

visio.lign[®]

Système cosmétique

Nous fournissons le système. C'est vous qui réussissez.

PRODUCTION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



FSC®

Le papier utilisé pour cette vue d'ensemble du système visio. lign a été produit selon les normes internationales FSC. La part en pâte à papier utilisée a été fabriquée à partir de surfaces forestières exploitées de façon exemplaire. Nous nous assurons entre autres que, lors du prélèvement du bois, la biodiversité et les processus écologiques des forêts soient respectés.

Esthétique naturelle pour des solutions implanto-prothétiques parfaites grâce à des matériaux composites polymères harmonisés entre eux.

visio.lign[®]
Système cosmétique

Indications visio.lign®:


- Restauration immédiate provisoire
- Restauration implanto-portée
- Bridges, ouvrages à barre et à verrous
- Technique des facettes
- Inlays - Onlays - Overlays
- Restaurations conjointes et adjoindes

Avantages de visio.lign®:

- + Stabilité chromatique
- + Résistance à la plaque
- + Esthétique reproductible
par des facettes cosmétiques préfabriquées
- + Taux d'abrasion comparable aux dents naturelles
- + Résistance cohésive avec tous les matériaux
pour infrastructures (*contrôle universitaire!*)
- + Compatibilité gnathologique
- + Standardisation de la mise en œuvre
- + Stratification librement formée personnalisée
- + Optimal pour le Finish et Cut-Back de
restaurations réalisées dans les systèmes CAO / FAO
- + Réparation des écailllements
du même niveau que la céramique
- = Parfaitement adapté pour des restaurations
implanto-prothétiques esthétiques tout comme
des restaurations conjointes et adjoindes

Les composants du système visio.lign®

Montage des dents		page
Cires de montage et silicones pour clés	beauty setup visio.sil	8 8 - 9
Facettes cosmétiques et dents complètes	novo.lign neo.lign	12 und 14 13 und 15
Cohésion		
Composite de scellement et primaire	combo.lign MKZ Primer Activateur MKZ EM K-Primer visio.link	19 18 18 18 18
Opaqueur	Opaqueur combo.lign (et catalyseur) Opaqueur crea.lign Opaqueur crea.lign Z, liner pour zircone	19 19 19
Stratification		
Teintes de maquillage	visio.paint	22
Liquide de modelage	Modelling Liquid crea.lign	22
Composites / Matériaux cosmétiques	Gel crea.lign Pâte crea.lign Stains crea.lign Teintiers crea.lign	23 23 23 23
Options		
System Kits	Mallettes et classeurs Kits visio.lign® Kits novo.lign Kits neo.lign Kits crea.lign Opaqueurs, teintes de maquillage et kits de mise en œuvre	26 - 27 28 - 30 31 32 33 - 36 37
Appareils, instruments et accessoires	bre.Lux Power Unit Kit d'instruments visio.lign® Toolkit Instruments/Consommables Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®	40 41 42 - 44 45
Combinaison de teintes et tableau des concordances	Repères pour la sélection des matériaux Appareils de photopolymérisation compatibles d'autres fabricants Temps de polymérisation bre.Lux Affectation des teintes: Opaqueur crea.lign, (Opaker) Opaqueur combo.lign (Opaker) Dentin & Enamel crea.lign	48 49 49 50 50 50

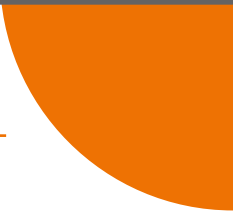

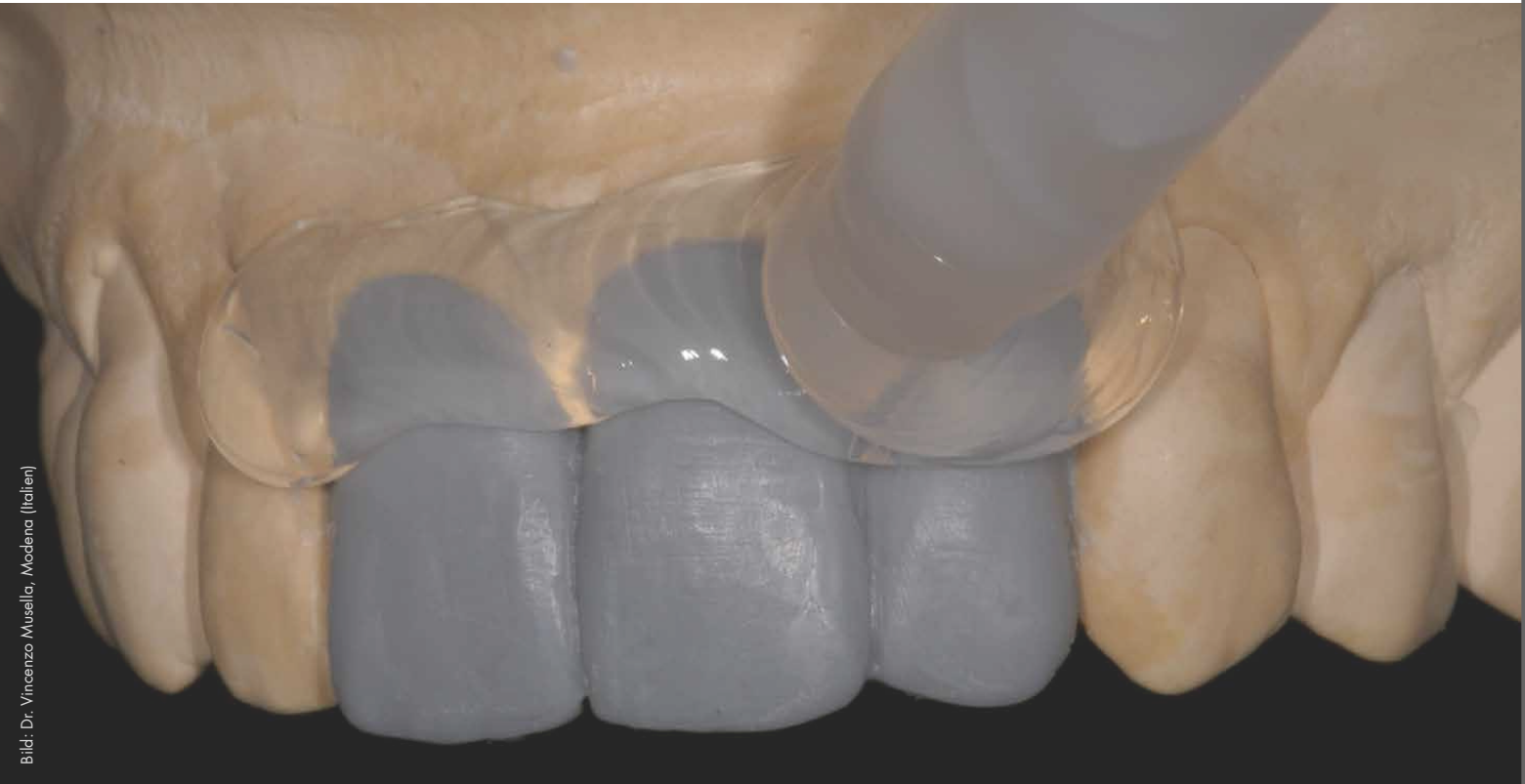


Bild: Dr. Vincenzo Musella, Modena (Italien)

Cires de montage et silicones pour clés



Cire de montage beauty setup

Cire de fixation de teinte dentine pour l'essai esthétique en bouche

La cire beauty setup est une cire de teinte dentine développée pour la fixation des facettes cosmétiques novo.lign lors des essais esthétiques en bouche.

En mélangeant deux colorations différentes on répond à l'échelle classique des teintes A-D.



clair



foncé



visio.sil fix

Silicone pour clés pour une reproduction précise des détails
 Dureté env. 55 ShoreA

visio.sil fix est un silicone pour clés à réaction d'addition pour une reproduction précise des détails. Avec visio.sil fix on peut reproduire parfaitement les moindres espaces interdentaires et la

sculpture de la gencive du montage en cire. Après la confection de la restauration il suffit de polir jusqu'à obtention d'une haute brillance ; c'est une économie de travail et de temps.




jaune



visio.sil

Silicone transparent pour clés
Dureté env. 60 ShoreA

visio.sil est un silicone transparent pour clés réticulant par addition pour la réalisation de clés transparentes dans l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux photopolymérisants.

 transparent

i **Avantage: silicones transparents pour clés visio.sil et visio.sil ILT**


Les silicones pour clés visio.sil et visio.sil ILT sont translucides. Le durcissement des facettes à coller est ainsi possible sans retirer la clé.



visio.sil ILT

Silicone pour clés transparent pour la "Inverse Layering Technique"
Dureté env. 75 ShoreA

visio.sil ILT a été développé tout spécialement pour la Inverse Layering Technique. Ce silicone réticulant par addition se distingue par sa haute dureté d'env. 75 Shore A. Il est visco-élastique pour pouvoir reproduire parfaitement les espaces interdentaires et la texture


 transparent

des surfaces, il est cependant résistant au fluage et se laisse appliquer aux endroits précis.

L'introduction en bouche de visio.sil ILT à l'état durci est autorisée (dispositif médical de la classe I).

i **Avantage: silicone pour clés transparent visio.sil ILT**

Le silicone pour clés visio.sil ILT est autorisé pour l'utilisation en bouche et il est parfaitement adapté au positionnement et collage de facettes indirectes.

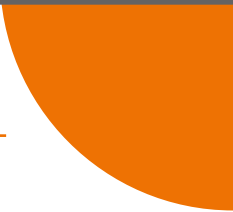



Facettes cosmétiques et dents complètes

novo.lign

Facettes cosmétiques

Les teintes, formes et la conception des couches sont parfaitement harmonisées aux dents complètes neo.lign et ainsi les teintes et les formes se laissent combiner.



novo.lign A

Anterior / Dents antérieures



novo.lign P

Posterior / Dents postérieures

- Esthétique naturelle selon l'exemple de la nature
- Les antérieures et molaires sont composées de composite PMMA (PMMA = polyméthacrylate de méthyle)
- Disponible dans toutes les teintes classiques A – D, teintes A1 – D4 ainsi que teinte Bleach BL3
- Les molaires novo.lign permettent la mise en œuvre de tous les concepts d'occlusion par le design multifonctionnel des surfaces masticatoires des formes G, W et L.
- Les formes W „extra“ larges en comparaison aux formes G « plus élancées » sont mieux adaptées au revêtement cosmétique d'infrastructures de couronnes et bridges à volume important...
- ... les formes L avec design de surfaces masticatoires linguales pour la réalisation de restaurations prothétiques implant-to-portées complètes



Épaisseur de la paroi buccale
1,0 mm

- 12 formes de MS
- 3 formes de MI

Formes Anterior aussi disponible
en kit de 2 ou de 4

(Illustration de taille réduite!)



Formes G



Épaisseur de la paroi buccale
1,2 mm

- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion

Disponible dans les tailles



Formes L



Épaisseur de la paroi buccale
1,0 mm

- Design lingualisé des surfaces masticatoires pour les prothèses complètes

Disponible dans les tailles



Formes W



Épaisseur de la paroi buccale
0,8 mm

- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion
- forme anatomique de la dent „extra“ large, particulièrement recommandée pour le revêtement de couronnes et bridges

Disponible dans les tailles



BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B

neo.lign

Dents complètes

Les teintes, formes et la conception des couches sont parfaitement harmonisées avec les facettes cosmétiques novo.lign et se laissent ainsi combiner de façon optimale.



- Esthétique naturelle à l'image de la nature
- Les antérieures et les postérieures sont constituées de fines couches en high-impact composite PMMA (métacrylate de polyméthyle)
- disponible dans toutes les teintes classiques A - D - teintes A1 – D4 ainsi que teinte Bleach BL3
- Les dents postérieures neo.lign permettent la mise en oeuvre de tout concept d'occlusion grâce au design multifonctionnel des surfaces masticatoires des formes G et L
- Avec les formes L de neo.lign, le système visio.lign permet un design „lingualisé des surfaces masticatoires" tout spécialement pour la réalisation de restaurations prothétiques complètes.

neo.lign A

Anterior / Dents antérieures



- 11 formes de MS
- 4 formes de MI

neo.lign P

Posterior / Dents postérieures

Formes G



- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion

Formes L



- Design lingualisé des surfaces masticatoires pour les prothèses complètes

Disponible dans les tailles



petiti ——— grand

Disponible dans les tailles



petiti ——— grand

3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

novo.lign

Facettes cosmétiques

Codage

Tous les présentoirs de dents pour facettes cosmétiques novo.lign portent une écriture couleur argent.

novo.lign - c'est le nom de toutes les facettes cosmétiques comprises dans le système cosmétique visio.lign.

novo.lign A



Vue d'ensemble de toutes les formes novo.lign pour MS et MI, + tableau de concordances

Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com
 ou à demander par téléphone au
 04 75 34 20 96 REF 0002020F


A correspond à **anterior**, toutes les formes de dents antérieures des maxillaires supérieurs et des maxillaires inférieurs en font partie.

Forme de la dent, par ex. D49

Teinte de la dent, par ex. A3

novo.lign P

Formes G

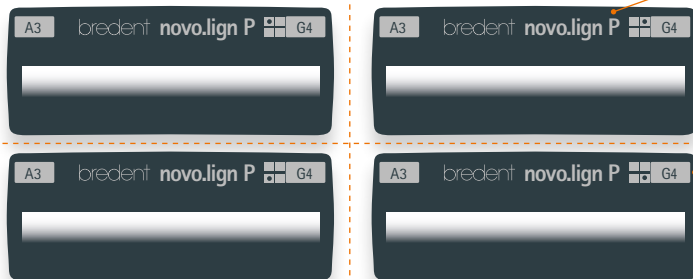


P correspond à **posterior**, toutes les formes de dents postérieures du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur en font partie.

Pour les variantes P des facettes cosmétiques novo.lign, on distingue entre les formes **G**, les formes **W** et les formes **L**.

Toutes les formes G, W et L sont disponibles en **différentes tailles**. L'indication de la taille est codée en chiffres. La taille augmente avec le chiffre croissant. Les formes G des facettes cosmétiques sont disponibles dans les tailles 3 et 4, les formes W en tailles 3, 4 et 5 et les formes L en tailles 2 et 3.

➔ *Tableau des tailles, voir page 12*


Formes W

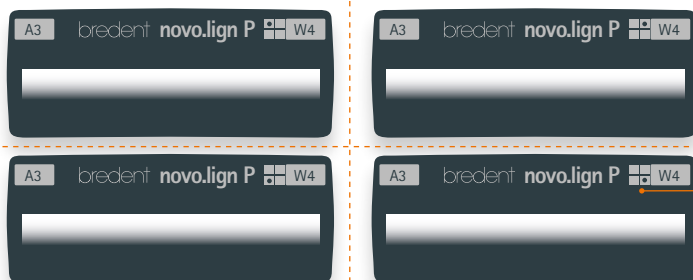

Les formes G et W sont **groupées en quadrants**, c.-à-d. dans un présentoir à dents on trouve par ex. des prémolaires et molaires du maxillaire inférieur du 3ème quadrant dans une forme et taille, par ex. W4.

Sur les présentoirs à dents des formes G, W et L tous les quatre quadrants sont représentés sous forme de quatre petites cases. Le quadrant correspondant est identifié par un point.

Formes L

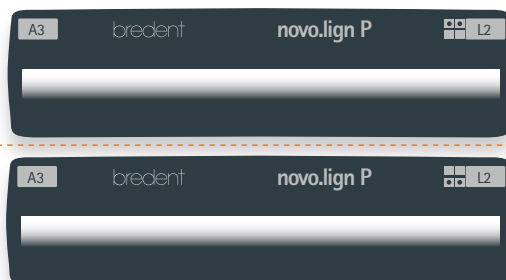

Les formes L des facettes novo.lign P sont disponibles en deux tailles : L2 et L3. Un présentoir à dents est soit garni de 6 dents du maxillaire supérieur : (16, 15, 14, 24, 25, 26) ou de 6 dents postérieures du maxillaire inférieur (46, 45, 44, 34, 35, 36).

neo.lign

Dents complètes

Codage

Tous les présentoirs des dents complètes neo.lign sont munis d'une écriture de couleur or.

neo.lign c'est le nom des dents complètes dans le système de revêtement cosmétique visio.lign.



Vue d'ensemble de toutes les formes neo.lign pour MS et MI
+ tableau de concordances

Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com ou
à demander par téléphone au
04 75 34 20 96 REF 0003290F

neo.lign A




A correspond à anterior, toutes les formes de dents antérieures des maxillaires supérieurs et des maxillaires inférieurs en font partie.

Forme de la dent, par ex. D48

Teinte de la dent, par ex. B4

neo.lign P

Formes G

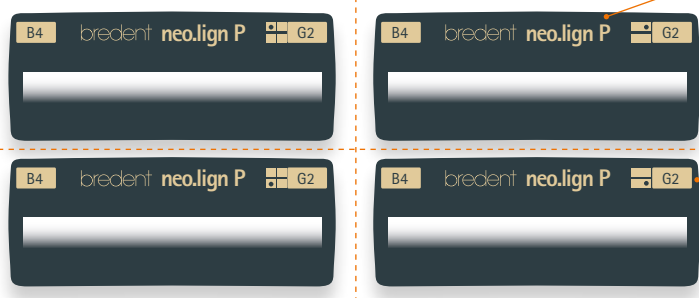

P correspond à posterior, toutes les formes de dents postérieures du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur en font partie.

Pour les variantes des postérieures P de neo.lign on distingue entre les formes G et les formes L.


Toutes les formes G, W et L sont disponibles en différentes tailles. L'indication de la taille est codée en chiffres. La taille augmente avec le chiffre croissant. Les formes G et les formes L des dents complètes sont disponibles dans les tailles 2, 3 et 4.

→ Tableau des tailles, voir page 13

Les formes G sont groupées selon les quadrants, par ex. les prémolaires et molaires du maxillaire supérieur du 1er quadrant se trouvent dans un présentoir de dents.

Pour les formes L, les présentoirs de dents sont garnis de toutes les dents pour le maxillaire supérieur (17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27) ou bien de toutes les dents du maxillaire inférieur (47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37) de la taille respective. Sur les présentoirs des formes G et L tous les quatre quadrants sont représentés sous forme de petites cases. Le quadrant correspondant est identifié par un point.

Formes L

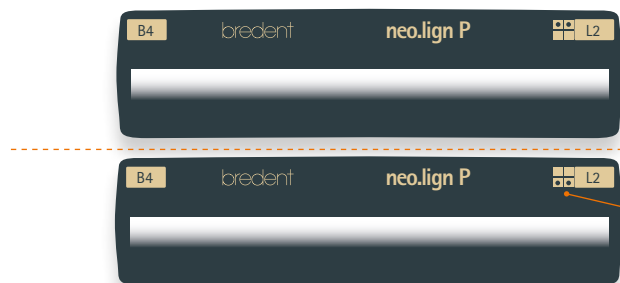

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.





Bild: Dr. Vincenzo Musella, Modena (Italien)

Primaire, opaqueur et composite de scellement

MKZ Primer



Cohésion entre composites et infrastructures métalliques

- Alliage titane
- Alliage CoCr (sans MP* et NP*)
- Oxyde de zircon (Aluminium/céramique spinell)

* MP: métal précieux ,
NP: métal non précieux

Le primaire MKZ sert au conditionnement de tous les alliages métalliques NP*, du titane, dioxyde de zircon, oxyde d'aluminium et de la céramique spinell. Ainsi on établit la cohésion chimique avec les composites tels que crea.lign. Le primaire MKZ est optimal pour coller des piliers personnalisés. Le primaire MKZ s'utilise aussi en bouche.

Activateur MKZ EM



Cohésion de composites avec des infrastructures en métaux précieux

- Alliages de métaux précieux (Au, Ag, Pt, Pd)
- Alliages éco (alliages à teneur réduite de MP*)

⚠ A utiliser uniquement en combinaison avec le primaire MKZ, voir le tableau Infos!

Utiliser l'activateur MKZ EM uniquement en combinaison avec le primaire MKZ dans un rapport de mélange 1:1 pour conditionner des infrastructures en métal précieux (Au, Ag, Pt, Pd) afin d'établir ainsi la cohésion chimique avec des composites tels que crea.lign. L'activateur MKZ EM est utilisable en bouche.



Avantages en mélangeant le
Primaire MKZ + Activateur MKZ EM



Le mélange des composants fait soi-même avant l'utilisation présente l'avantage que l'on arrive même avec un flacon entamé à réaliser à long terme un mélange avec la

même composition en obtenant ainsi le conditionnement nécessaire.

K-Primer



Cohésion des composites avec des infrastructures en céramique d'oxydes

- Céramique aux silicates (ébauches CAO, e-max, Mark II, disilicate de lithium, céramique de verre)

Le primaire K (ou K-Primer) établit la cohésion entre la céramique cosmétique, la céramique pressée, e.max press ainsi que la céramique aux silicates, par ex. les ébauches CAO, Mark II avec les composites tels que crea.lign. Il est idéal pour réparer les revêtements céramiques vu que le primaire K se laisse utiliser en bouche.

visio.link



Cohésion des composites avec les résines

- Composites (Composites cosmétiques/dents en composites)
- Matériaux en PMMA
- Polymère de haute performance (BioXS/BioHPP®)

PMMA universel, utilisable en bouche, photopolymérisable et primaire pour composites pour une cohésion optimale entre les résines pour prothèses à base de PMMA, matériaux composites high impact PMMA (facettes cosmétiques novo.lign /dents complètes & dents en résine neo.lign) et combo.lign.

Opaqueur combo.lign (et catalyseur)




i

Opaqueur - Catalyseur combo.lign

Pas de photopolymérisation nécessaire pour le durcissement ! Pour l'autopolymérisation mélanger l'opaqueur catalyseur combo.lign avec l'opaqueur pâte teintée combo.lign dans un rapport de mélange 1 : 1.

Opaqueur photopolymérisant et autopolymérisant qui garantit un durcissement parfait. Sa teinte est harmonisée avec le composite de scellement combo.lign et avec les facettes cosmétiques novo.lign. Système de cohésion testé en université, compatible avec tous les

primaires pour métaux et procédés de silanisation, optimal en utilisant des rétentions mécaniques. Livrable en trois teintes dentaires et une teinte gencive. Ceci assure une stabilité chromatique en combinaison avec combo.lign dans toutes les teintes A-D.

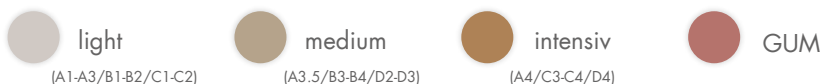

→ Tableaux de combinaison de teintes, voir page 50

Composite de scellement combo.lign



Composite de scellement photopolymérisant unissant deux types de polymérisation pour une reproduction sûre des teintes et une cohésion optimale

des facettes cosmétiques novo.lign et de tous les matériaux pour infrastructures. Livrable dans les teintes classiques A-D et dans la teinte Bleach BL3.

→ Teintes classiques A à D et teinte Bleach BL3, voir pages 12 et 13

Opaqueur crea.lign



L'opaqueur photopolymérisant crea.lign vous donne de l'assurance pour les teintes dans la stratification librement formée et en utilisant les facettes cosmétiques novo.lign. Avec le primaire MKZ il forme la base pour une cohésion optimale avec les matériaux d'infrastructures métalliques et

céramiques et ainsi pour des restaurations prothétiques exemptes de hiatus marginaux. Avec 8 opaqueurs seulement on obtient toutes les teintes du système classique A-D. Un liner spécial pour zircon et un opaqueur GUM font également partie du kit.



→ Tableaux de combinaison de teintes, voir page 50

Opaqueur crea.lign Z, liner pour zircon



Le liner pour zircon est un opaqueur transparent photopolymérisant. Pour le zircon il est absolument nécessaire après le primaire adapté (primaire

MKZ), d'appliquer le liner pour zircon, afin d'établir une cohésion sûre entre l'oxyde de zircon et le composite.



⚠ Pour les infrastructures en zircon teintées, la couleur transparait, en conséquence il ne faut pas appliquer d'opaqueur classique – à condition que la teinte de l'infrastructure corresponde aux teintes classiques A-D !

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.



Bild: Dr. Vincenzo Musella, Modena (Italien)

Composites/Matériaux cosmétiques, Teintes de maquillage et Liquide de modelage

Composite / matériau cosmétique crea.lign

Avantages

- à charges purement nano-céramiques (ne contient pas de verre dentaire !)
- caractéristiques de polissage optimales pour des surfaces parfaites
- R_a 0,03 μm (= valeur rugosimétrique moyenne de qualité/rugosité de surface)
- visco-élastique, meilleur recouvrement transition sans hiatus vers la facette.
- Faible absorption d'eau, assure la stabilité mécanique
- pas de dépôt de plaque, prédestiné pour les restaurations implanto-portées
- composite photopolymérisant livrable en tant que gel ou pâte
- Gel dans les teintes dentines classiques A-D, incisives, GUM, Modifier, Transpa, Stains et la teinte Bleach BL3
- Pâte dans les teintes dentine classiques A-D et en teinte Bleach BL3
- Opaqueur photopolymérisant crea.lign dans huit teintes et une teinte gencive pour les stratifications librement formées.

- ➔ Opaqueur crea.lign voir page 19
- ➔ Accessoires crea.lign voir page 39
- ➔ Teintes classiques A à D et teinte Bleach BL3, voir également page 12 et 13
- ➔ Tableaux de combinaison de teintes, voir page 50

Kit de teintes de maquillage visio.paint

Les teintes de maquillage liquides photopolymérisables visio.paint (white/blue/black/ivory/ocher/ebony) sont mises en place à l'aide de la Cut-Back Technique ou appliquées directement et stratifiées.

L'application d'un maquillage en surface n'est recommandée que pour des restaurations provisoires. En stratifiant avec du composite l'effet de la teinte est préservé. Avec les teintes de maquillage visio.paint on peut intensifier toutes les teintes des résines PMMA et composites classiques.



white

ivory



blue

ocher



black

ebony

crea.lign Modelling Liquid

Avec le crea.lign Modelling Liquid on peut augmenter l'aptitude au fluage de la pâte et du gel crea.lign. En rajoutant le liquide, le module d'élasticité des masses diminue et ainsi l'élasticité des masses crea.lign augmente. En outre,

lors des personnalisations rouge-blanc cela permet une transition homogène de la résine pour prothèses au composite crea.lign. Les masses crea.lign résistent aux décolorations et à la plaque.



⚠ Dans le rapport de mélange avec crea.lign la part de Modelling Liquid ne doit pas dépasser 30 %.

Gel crea.lign

Gel Enamel et Incisal



crea.lign Incisal (opal/blue/rose/universal) servent à côté des masses Enamel (E1/E2/E3/E4) à accentuer davantage la zone incisale, par ex. pour conférer un aspect de jeunesse à une incisive.

Gel GUM



crea.lign GUM (light/rose/pink/red) sont des personnalisations pour la partie gencive, elles rendent les restaurations dentaires plus vivantes.

Gel Transpa



crea.lign Transpa clear est la variante claire comme le cristal du composite crea.lign avec d'excellentes propriétés physiques et une cohésion optimale au matériau BioHPP. Par sa transparence, crea.lign Transpa permet en interaction avec les teintes de maquillage visio. paint de procéder à des caractérisations translucides hautement esthétiques – le revêtement composite parfait pour les exigences les plus élevées.

Gel Dentin / Modifier



crea.lign Dentin est disponible dans les teintes classiques A-D Dentin et dans la teinte Bleach BL3.



crea.lign Modifier (beige/olive/caramel/lila/umbra) sont des masses à teintes intenses - par ex. pour souligner la zone du collet ou imiter des tâches de calcaire.

Pâte crea.lign

Pâte Dentin



La pâte crea.lign Dentin est la variante du composite crea.lign sous forme de pâte. La pâte crea.lign contient également des charges purement nanocéramiques (ne contient pas de verre dentaire !), elle présente d'excellentes propriétés de polissage et se laisse mettre en œuvre avec toutes les autres masses de crea.lign sans aucun problème.


La pâte crea.lign est disponible dans les teintes classiques A-D Dentin et dans la teinte Bleach BL3.

crea.lign Stains



Les crea.lign Stains (brown/orange) sont des masses intenses photopolymérisantes que l'on utilise pour la personnalisation chromatique de revêtements cosmétiques en composites. Il n'est pas nécessaire de stratifier les crea.lign Stains, ils servent par ex. à accentuer des espaces interdentaires, les arêtes ou fissures d'une dent.

Teintiers crea.lign / shade guides

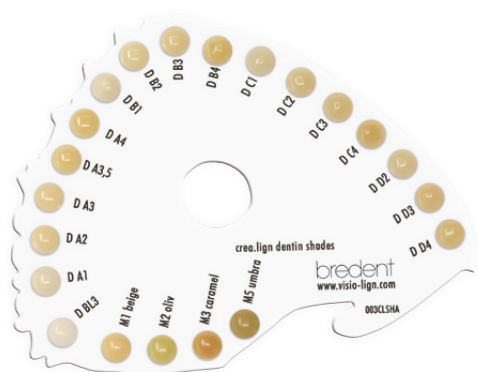

⚠ L'échantillon de la teinte ne fait pas partie des fournitures

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.



System Kits

Mallette en matière plastique Chipping Repair Kit

avec contenu pour les laboratoires dentaires

partie arrière



Partie avant

- ➔ Liste des produits / Contenu du Chipping Repair Kit voir page 36
- ➔ La mallette en matière plastique est aussi disponible vide!
REF CLIGNSETT

Mallette aluminium Chipping Repair Kit

avec contenu pour les cabinets dentaires
de chirurgiens-dentistes



- ➔ Liste des produits / Contenu du Chipping Repair Kit voir page 36

Mallette en aluminium - Carte vivante des formes

pour facettes cosmétiques novo.lign et / ou dents complètes neo.lign



- ➔ Liste des produits / Contenu:
carte design vivante novo.lign, voir page 31




- ➔ Liste des produits / Contenu:
carte vivante des formes neo.lign, voir page 32

Mallette aluminium Esthétique rouge-blanc



→ Liste des produits / Contenu
du kit Esthétique rouge-blanc
voir page 33

Mallette aluminium crea.lign freestyle Kit complet

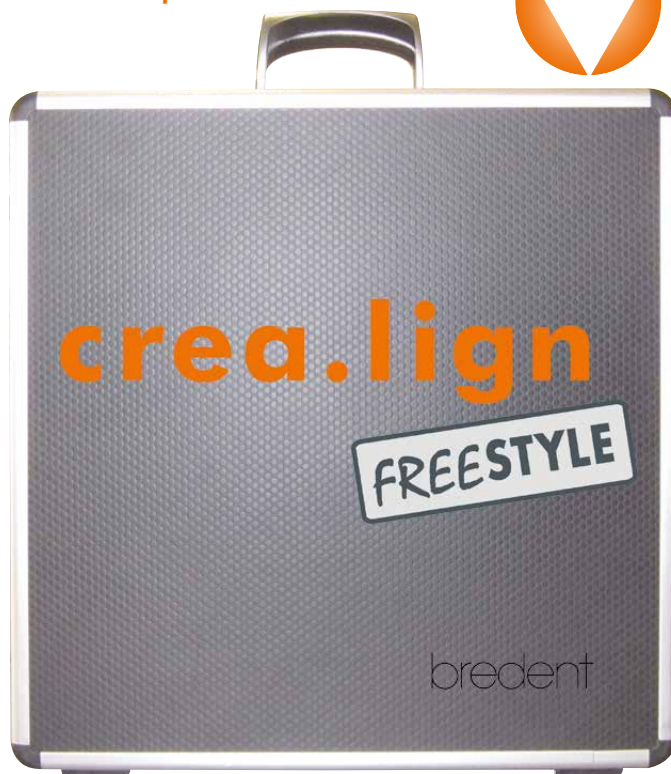


→ Liste des produits du kit complet crea.lign, voir page 35

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Kits visio.lign®

REF VLIGNSET2
Kit d'introduction visio.lign® 2

Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®

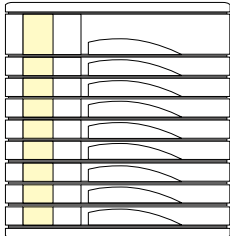

1 x

Facettes cosmétiques novo.lign A - antérieures



10 présentoirs de dents

Facettes cosmétiques novo.lign P - postérieures



8 présentoirs de dents

visio.link, 10 ml

1 x



Canule de mélange combo.lign, T. 2

1 x 10



Composite de scellement combo.lign, 8 g

1 x



Assortiment d'une teinte au choix

 → Teintes classiques A à D
 et teinte Bleach BL3, voir page 12
 und 13

 Présentoirs de dents novo.lign A et P
 Choix des formes des facettes cosmé-
 tiques postérieures et antérieures

 → voir **i**-Box

 Présentoirs de dents novo.lign P
 Choix des formes des facettes cosmé-
 tiques pour postérieures


→ Tableaux des tailles voir page 12


 Vue d'ensemble de toutes
 les formes novo.lign
 MS et MI plus tableau
 des concordances

 Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com
 ou à demander par téléphone au 04 75 34 20 96

REF 0002020F
REF VLIGNSET3
Kit d'introduction visio.lign® 3

Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®

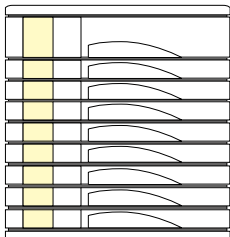

1 x

Facettes cosmétiques novo.lign A - Antérieures



13 présentoirs de dents

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures



8 présentoirs de dents

 Manche pour
 une main gel crea.lign


2 x


visio.link, 10 ml

1 x



Opaqueur crea.lign, 4 g

1 x

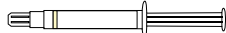

Pin Cover

1 x 10

Canule d'application

1 x 10

Gel crea.lign, 5g

2 x

Canule de mélange combo.lign, T. 2

1 x 10



Composite de scellement combo.lign, 8 g

1 x



Assortiment d'une teinte au choix

 → Teintes classiques A - D et
 teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

 Présentoirs de dents novo.lign A et P
 Choix des formes des facettes pour
 antérieures et postérieures

 → voir **i**-Box

 Présentoirs de dents novo.lign P
 Choix des formes des facettes pour
 postérieures

→ Tableaux des tailles voir page 12


 Gel crea.lign Incisal et
 Dentin avec choix des teintes

→ Teintes voir page 23

Kits visio.lign®

REF VLIGNSET4 Kit d'introduction visio.lign® 4

Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®

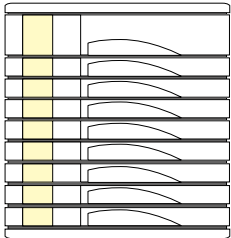

1 x

Facettes cosmétiques visio.lign A - Antérieures



26 présentoirs de dents

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures



24 présentoirs de dents

Manche pour une main
Gel crea.lign



3 x

visio.link, 10 ml

1 x



Assortiment en deux teintes au choix

➔ Teintes classiques A à D et teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

Présentoirs de dents novo.lign A und P
Choix des formes des facettes cosmétiques postérieures et antérieures
➔ voir **i**-Box

Présentoirs de dents novo.lign P
Choix des formes des facettes cosmétiques pour postérieures
➔ Tableaux des tailles voir page 12

Choix des teintes du gel crea.lign
Incisal et Dentin
➔ Teintes voir page 23

Opaqueur crea.lign, 4 g

2 x

Pin Cover

1 x 10

Canule d'application

1 x 10

Gel crea.lign, 5g

10 x


Canule de mélange combo.lign, T. 2

1 x 10

Composite de scellement combo.lign, 8 g

2 x

Canule de mélange, vert, T. 4

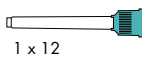

1 x 12

Silicone pour clé visio.sil, 50 ml

1 x

MKZ Primer, 4 ml

1 x




Modelling Liquid, 10 ml

1 x




REF VLUPSETN visio.lign® Upgrade Kit N

Opaqueur crea.lign, 4 g

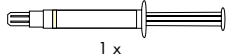

1 x

Facettes cosmétiques novo.lign A - Antérieures

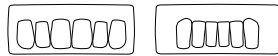

13 présentoirs de dents

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures



12 présentoirs de dents

Gel crea.lign, 5g

1 x

Assortiment en une teinte au choix

➔ Teintes classiques A à D et teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

Présentoirs de dents novo.lign A und P
Choix des formes des facettes cosmétiques postérieures et antérieures
➔ voir **i**-Box

Présentoirs de dents novo.lign P
Choix des formes des facettes cosmétiques pour postérieures
➔ Tableaux des tailles voir page 12

Gel crea.lign au choix
➔ Vue d'ensemble voir page 23

Mischkanüle combo.lign, Gr. 2

1 x 10

Composite de scellement combo.lign, 8 g

1 x

Kits visio.lign®


REF VLIGNPRVC
Kit visio.lign® PRVC

Mallette aluminium visio.lign®



1 x

Facettes cosmétiques novo.lign A - Antérieures

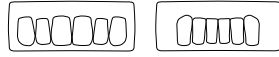

1 présentoirs de dents MS

1 présentoirs de dents MI

novo.lign P Verblendschalen - Seitenzähne



2 présentoirs de dents MS

2 présentoirs de dents MI

2 présentoirs de dents MS 2 présentoirs de dents MI

 Manche pour une main
 gel crea.lign


1 x

visio.link, 10 ml



1 x

Canule d'application

8 x

Gel crea.lign, 5g

8 x

Canule de mélange combo.lign, T.2

1 x 10

Composite de scellement combo.lign, 8 g

1 x

crea.lign Stain, 1,4 g

2 x

MKZ Primer, 4 ml

1 x

Modelling Liquid, 10 ml

1 x

Opaqueur combo.lign, 4 g

1 x

Teintier crea.lign / Shade guide (garni)

1 x

1 x

Assortiment en une teinte au choix

 → Teintes classiques A à D et
 teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

 Présentoirs de dents, novo.lign A et P
 Choix des formes des facettes cosmé-
 tiques postérieures et antérieures

→ voir -Box

 Présentoirs de dents novo.lign P
 Choix des formes des facettes cosmé-
 tiques pour postérieures

→ Tableaux des tailles voir page 12

Gel crea.lign et Stains au choix

→ Vue d'ensemble voir page 23

Opaqueur combo.lign

Choix des teintes

→ Teintes voir page 19

Kits novo.lign


REF VLIGNPRVN Carte des formes vivantes novo.lign A & P

Mallette aluminium visio.lign®




1 x

Facettes cosmétiques novo.lign A - Antérieures

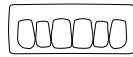


12 x

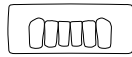


3 x

= 15 présentoirs de dents:
1 présentoir à dents par forme
→ voir ⓘ-Box

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures

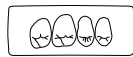

5 x

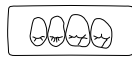

5 x


= 20 présentoirs de dents:
resp. forme G et W
dans les tailles:
G3, G4 und W3, W4, W5.



5 x




5 x

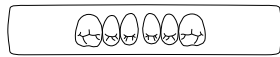

1 x

= 4 présentoirs de dents:
resp. 1 x forme L
dans les tailles:
L2 et L3

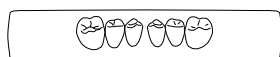

1 x

Assortiment en une teinte au choix

→ Teintes classiques A à D et teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

Présentoirs de dents novo.lign A et P
Facettes cosmétiques postérieures et antérieures

→ voir ⓘ-Box

Présentoirs de dents novo.lign P

Choix des formes des facettes cosmétiques pour postérieures

→ Tableaux des tailles voir page 12

REF VLIGNSETP novo.lign P Upgrade Kit

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures



4 x



4 x

= 16 présentoirs de dents



4 x



4 x

Assortiment en deux teintes au choix

→ Teintes classiques A à D et teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

Libre choix des présentoirs de dents novo.lign A et P (facettes cosmétiques des postérieures à choisir parmi les formes G et W)

→ Tableaux des tailles novo.lign P voir page 12 et /ou toutes les formes novo.lign A et P voir ⓘ-Box



Vue d'ensemble de toutes les formes novo.lign MS et MI plus tableau des concordances

Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com ou à demander par téléphone au 04 75 34 20 96

REF 0002020F

Kits neo.lign

REF VLIGNPRVT


Carte de formes vivantes neo.lign A & P

visio.lign® Mallette aluminium



1 x

Dents complètes - Antérieures neo.lign A

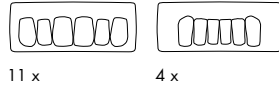


11 x

4 x

 = 15 présentoirs de dents:
 1 présentoir à dents par forme
 → voir **i**-Box

Dents complètes neo.lign P - Postérieures forme G

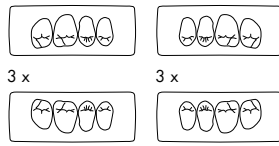

3 x


3 x

3 x

3 x

 = 12 présentoirs de dents:
 resp. 1 x forme G dans les tailles:
 G2, G3 et G4

Dents complètes neo.lign P - Postérieures formes L

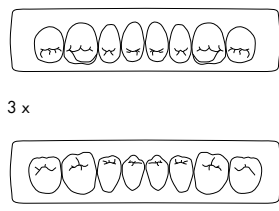

3 x


3 x

 = 6 présentoirs de dents:
 resp. 1 x forme L dans les tailles:
 L2, L3 et L4

REF NL28for28

Kit neo.lign 28 pcs. (Uniquement valable pour l'Allemagne et 1 x par client!)

Dents complètes neo.lign A - Antérieures

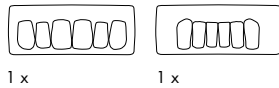


1 x

1 x

 = 2 présentoirs de dents:
 Libre choix des formes des antérieures
 → voir **i**-Box

Dents complètes neo.lign P - Formes L postérieures

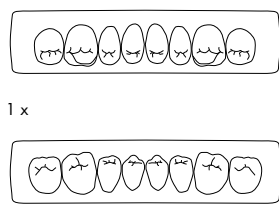

1 x


1 x

 = 2 présentoirs de dents:
 Postérieures resp. 1 x en forme L
 à choisir parmi les tailles:
 L2 / L3 / L4

REF NLUPSET2

neo.lign A & P Upgrade Kit

Dents complètes neo.lign A - Antérieures

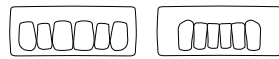


= 12 présentoirs de dents

Dents complètes neo.lign P - Formes G postérieures



= 12 présentoirs de dents

Dents complètes neo.lign P - Formes L postérieures

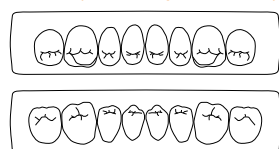
 Vue d'ensemble de toutes
 les formes neo.lign M5 et M1 +
 tableau des concordances

 Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com
 ou à demander par téléphone au 04 75 34 20 96

REF 0003290F

 Assortiment d'une teinte au choix

 → Teintes classiques A à D et
 teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

 Présentoirs de dents neo.lign A et P
 Libre choix des formes de dents antérieures et postérieures

 → voir **i**-Box

Présentoirs de dents neo.lign P

Formes de dents complètes postérieures

→ Tableaux des tailles voir page 13

 Assortiment d'une teinte au choix

 → Teintes classiques A à D
 et teinte Bleach BL3, voir page 12
 und 13

Présentoirs de dents neo.lign P

Formes de dents postérieures complètes

→ Tableaux des tailles voir page 13

 Assortiment d'une teinte au choix

 → Teintes classiques A à D
 et teinte Bleach BL3, voir page 12
 et 13

 Présentoirs de dents neo.lign A et P
 Libre choix des formes de dents antérieures et postérieures

 → voir **i**-Box

Présentoirs de dents neo.lign P


Formes de dents postérieures complètes

→ Tableaux des tailles voir page 13

Kits crea.lign

REF CLIGNSET12 Kit d'introduction crea.lign avec porte-seringues


Porte-seringues crea.lign
Matière plastique

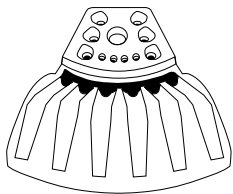

1 x


Manche pour une main Gel crea.lign

12 x

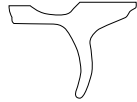

crea.lign Stain, 1,4 g

2 x

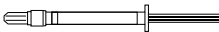

crea.lign Stains et Gel

Choix des teintes

➔ voir page 23

Pin Cover

2 x 10



Canule d'application

2 x 10



Gel crea.lign, 5g

12 x



Modelling Liquid, 10 ml


1 x



REF CLIGNSETN Kit d'introduction crea.lign N

Manche pour une main Gel crea.lign

3 x

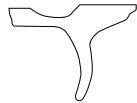

Gel crea.lign, 5g

10 x



Gel crea.lign

Choix des teintes

➔ voir page 23

REF CLIGNSETG Kit esthétique rouge-blanc

Mallette aluminium



1 x

Modelling Liquid

10 ml

1 x



Prothèse pour démonstration

2 x



Manche pour une main Gel crea.lign

1 x



visio.link

10 ml

1 x



Canule d'application

8 x



Gel crea.lign Incisal, 5g




1 x I1 opal

1 x I2 blue

Bloc de mélange, grand




Gel crea.lign Modifier, 5g

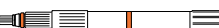

1 x M1 beige

1 x M4 lila

Instructions de stratification

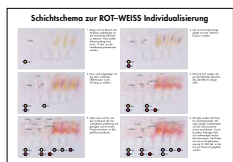

1 x


MKZ Primer

4 ml

1 x



Gel crea.lign GUM, 5g

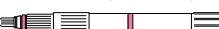

1 x G1 light

1 x G2 rosa

1 x G3 pink


1 x G4 red

Pinceau Magic Brush N° 2



2 x

Opaqueur combo.lign, 4 g

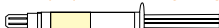


1 x GUM

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Kits crea.lign

REF CLIGNSETFN crea.lign freestyle Set FN

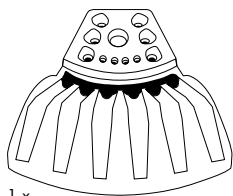 Porte-seringues crea.lign
 Matière plastique


1 x

Modelling Liquid

10 ml



1 x

Pin Cover

2 x 10



Canule d'application

2 x 10



6 x

Manche pour une main Gel
crea.lign

9 x

Gel crea.lign Incisal, 5g

6 x




Gel crea.lign Modifier, 5g

2 x



Gel crea.lign Dentin, 5g

17 x

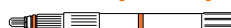
 Incisal et Modifier crea.lign
 Choix des teintes

→ voir page 23


 crea.lign Dentin
 dans les 16 teintes classiques A-D,
 plus 1 x teinte Bleach BL3

→ voir page 12 et 13

 Opaqueur crea.lign
 Tableau de concordance des teintes

→ voir page 50


crea.lign Stain, 1,4 g

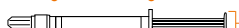

1 x S1 orange

1 x S2 brown

Opaqueur crea.lign, 4 g

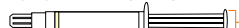

1 x Farbe 1

1 x Farbe 4

1 x Farbe 7

1 x Farbe 2

1 x Farbe 5

1 x Farbe 8

1 x Farbe 3

1 x Farbe 6

1 x GUM

REF CLPNSET7

Kit d'introduction crea.lign en pâte 7 teintes

 1 x A2
 1 x A3
 1 x A3,5

 1 x B2
 1 x B3
 1 x C3
 1 x D3

Pâte crea.lign Dentin, 3g



Alimentation rotative



7 x

Informations sur la pâte crea.lign

→ voir page 23

Kit d'essai crea.lign freestyle

REF CLFKSETA20

A2

ou

REF CLFKSETA30


A3

ou

REF CLFKSETA35

A3,5

1 x Gel crea.lign Dentin, 5g

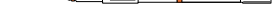


1 x Pâte crea.lign Dentin, 3g



1 x Gel crea.lign Incisal, 5g



1 x Opaqueur crea.lign, 4 g

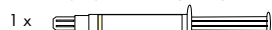
 Le gel crea.lign Incisal et l'opaqueur
 crea.lign sont livrés en kit assortis à la
 teinte de l'assortiment sélectionné (A2,
 A3 ou A3.5).

Kits crea.lign


REF CLIGNSETFK Kit complet crea.lign freestyle

Mallette en aluminium,
Largeur 42,5 cm x hauteur 43,5 cm x profondeur 20,5 cm




1 x

Modelling Liquid

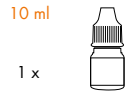

visio.link

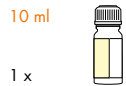


Cupules pour un seul emploi



Bloc de mélange petit



MKZ Primer

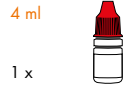

Activateur MKZ



K-Primer



Spatule



L'assortiment contient toutes les teintes disponibles des composants suivants:


- Opaqueur crea.lign
- Pâte crea.lign
 - Dentin (uniquement Dentin!)
- crea.lign Gel
 - Incisal
 - Transpa clear
 - Dentin
 - Modifier
 - GUM
- crea.lign Stain
- visio.paint

➔ voir page 19, 22 und 23

Primaire et activateur


➔ voir page 18

Porte-séringues crea.lign
acier inoxydable

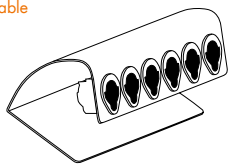

2 x


Pinceau pour un seul emploi

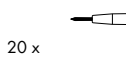

Porte-pinceau



Pâte crea.lign Dentin, 3g

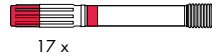


Alimentation rotative



Teintier crea.lign dentin shade
(non garni)

1 x

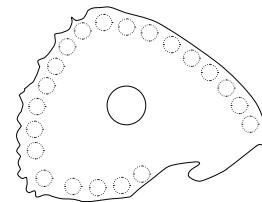

Manche pour une main Gel crea.lign



12 x


Pin Cover




Canule d'application



Gel crea.lign Incisal, 5g

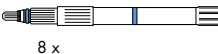


Gel crea.lign Transpa clear, 5g

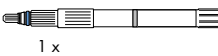

Teintier crea.lign Incisal, Stains & GUM
(non garni)


1 x

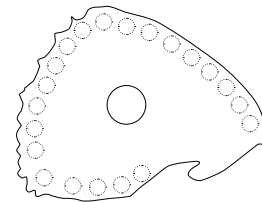


kit visio.paint




crea.lign Stain, 1,4 g

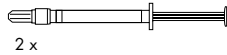


Opaqueur crea.lign, 4 g

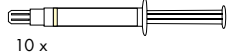


Gel crea.lign Dentin, 5g

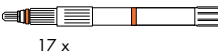

Gel crea.lign Modifier, 5g

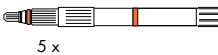


Gel crea.lign GUM, 5g

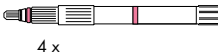

Classeur infos visio.lign

avec divers imprimés, tels que par ex. le Manuel crea.lign Freestyle et le présentoir de table avec les Instructions de stratification illustrées.

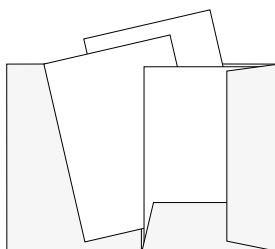

1 x

i Classeur infos visio.lign
avec divers manuels imprimés


Gratuit - à demander par téléphone
au 04 75 34 20 96 REF 0090060F

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Kits crea.lign

REF CLIGNSETFH Kit crea.lign freestyle FH


Porte-séringues crea.lign
acier inoxydable

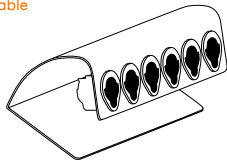

1 x

Pin Cover
2 x 10

Opaqueur crea.lign, 4 g

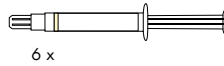

6 x

Pâte crea.lign Dentin, 3g




8 x

Canule d'application



2 x 10

Manche pour une main Gel
crea.lign

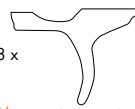

8 x

Alimentation rotative



8 x

Opaqueur crea.lign

Choix des teintes

→ voir page 19

Pâte crea.lign et Gel

Choix des teintes


→ voir page 23

Gel crea.lign Incisal, 5g



6 x

Gel crea.lign Modifier, 5g

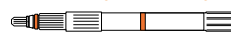

2 x

REF CLIGNSETA Chipping Repair Kit, chirurgien-dentiste

Mallette en aluminium



1 x

MKZ Primer

4 ml

1 x



Activateur MKZ EM

4 ml

1 x




K-Primer

3 ml


1 x



Feuillet séparé: Mode d'emploi

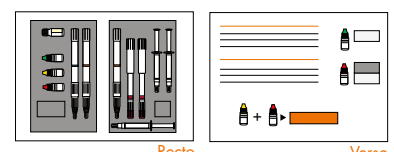


1 x

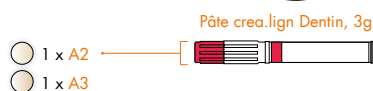

1 x A2

1 x A3

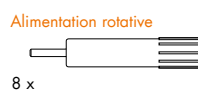

8 x

Cupules pour un seul emploi

1 x 12



Pin Cover

1 x 10



Canule d'application

1 x 10



Gel crea.lign Incisal, 5g



1 x E1

Opaqueur crea.lign, 4 g



1 x Teinte 2

1 x Teinte 3

visio.link

10 ml

1 x



Gel crea.lign Dentin 5g




1 x A2

1 x A3

Opaqueur crea.lign Z,

Liner pour zircone 4 g

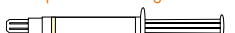

1 x

REF CLIGNSETT1 Chipping Repair Kit, laboratoire dentaire

Mallette en matière plastique




1 x

Primaire MKZ

4 ml

1 x

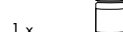

Activateur MKZ

4 ml

1 x




K-Primer

3 ml

1 x



Vue d'ensemble Primaire - Indications & Utilisation

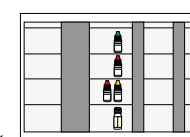

1 x

visio.link

10 ml

1 x



Cupules pour

un seul emploi


1 x 12



Kits d'opaqueurs


REF OLIGNSET1 Kit d'opaqueurs combo.lign

Catalyseur combo.lign, 4 g

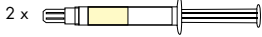

2 x

Opaqueur combo.lign, 4 g

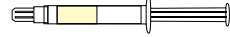

]

- 1 x light
- 1 x medium
- 1 x intensiv
- 1 x GUM

Opaqueur combo.lign
et catalyseur

➔ voir page 19


i

**L'orthographe Opaquer (opaqueur)
est intentionnelle – pas une faute!**

L'orthographe „Opaquer“ (opaqueur) à l'opposé de „Opaker“ sert dans le système visio.lign de caractère distinctif supplémentaire entre l'Opaker crea.lign et l'Opaquer combo.lign (s'applique surtout au conditionnement, dans les traductions la préférence a été accordée à l'orthographe française.

REF CLFHOPSET Kit d'opaqueur crea.lign

Opaqueur crea.lign, 4 g

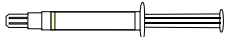

]

- 1 x Teinte 1
- 1 x Teinte 2
- 1 x Teinte 3
- 1 x Teinte 4
- 1 x Teinte 5
- 1 x Teinte 6
- 1 x Teinte 7
- 1 x Teinte 8
- 1 x GUM

Opaqueur crea.lign

➔ voir page 19


Kit de teintés cosmétiques visio.paint

Pinceau pour un seul emploi



6 x

Porte-pinceau

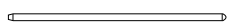

1 x

visio.paint

3 ml



]

- 1 x white
- 1 x blue
- 1 x black
- 1 x ivory
- 1 x ocher
- 1 x ebony

visio.paint

➔ voir page 22

Bloc de mélange

petit



1 x

REF 54001250

visio.lign® Toolkit (Kit d'instruments pour les composites)

➔ voir page 41

REF VLTOOLKIT

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.





Appareils, Instruments et Accessoires

bre.Lux Power Unit



Appareil polyvalent pour cabinets et laboratoires dentaires

Pour la mise en œuvre de matériaux de revêtement cosmétique et de matériaux dentaires plusieurs appareils étaient nécessaires jusqu'à présent. Avec la bre.Lux Power Unit on arrive pour la première fois à réaliser la mise en œuvre de tous les matériaux courants avec un seul appareil.

Puissance DEL démultipliée et agréable à manipuler

La bre.Lux Power Unit est un appareil de photopolymérisation DEL avec un total de 21 Power DEL couvrant une longueur d'ondes de 370 - 500 nm. Les DEL ont une durée de vie d'env. 20.000 heures.

La lampe à main bre.Lux DEL N (avec câble en spirale) est également équipée d'une plage de puissance de 370 - 500 nm.


Avantages de la bre.Lux Power Unit

- Fixation/premier durcissement/polymérisation intermédiaire et finale directement au poste de travail avec un seul appareil
- 370 - 500 nm couvrent la plage de puissance nécessaire, aussi la lampe à main
- La temporisation et réduction de la puissance augmentent les propriétés et résultats des matériaux dentaires
- La temporisation au démarrage et la durée de polymérisation se laissent combiner facilement
- Grand volume pour 2 modèles, dispersion lumineuse optimale et régulière
- Dispose d'une tubulure flexible avec bague de fixation pour la lampe à main - la bague servant de troisième main en permettant de travailler à deux mains

→ Exemple d'utilisation de la lampe à main, voir page 39

→ Temps de polymérisation du bre.Lux, voir page 49

visio.lign® Toolkit (Kit d'instruments pour les composites)

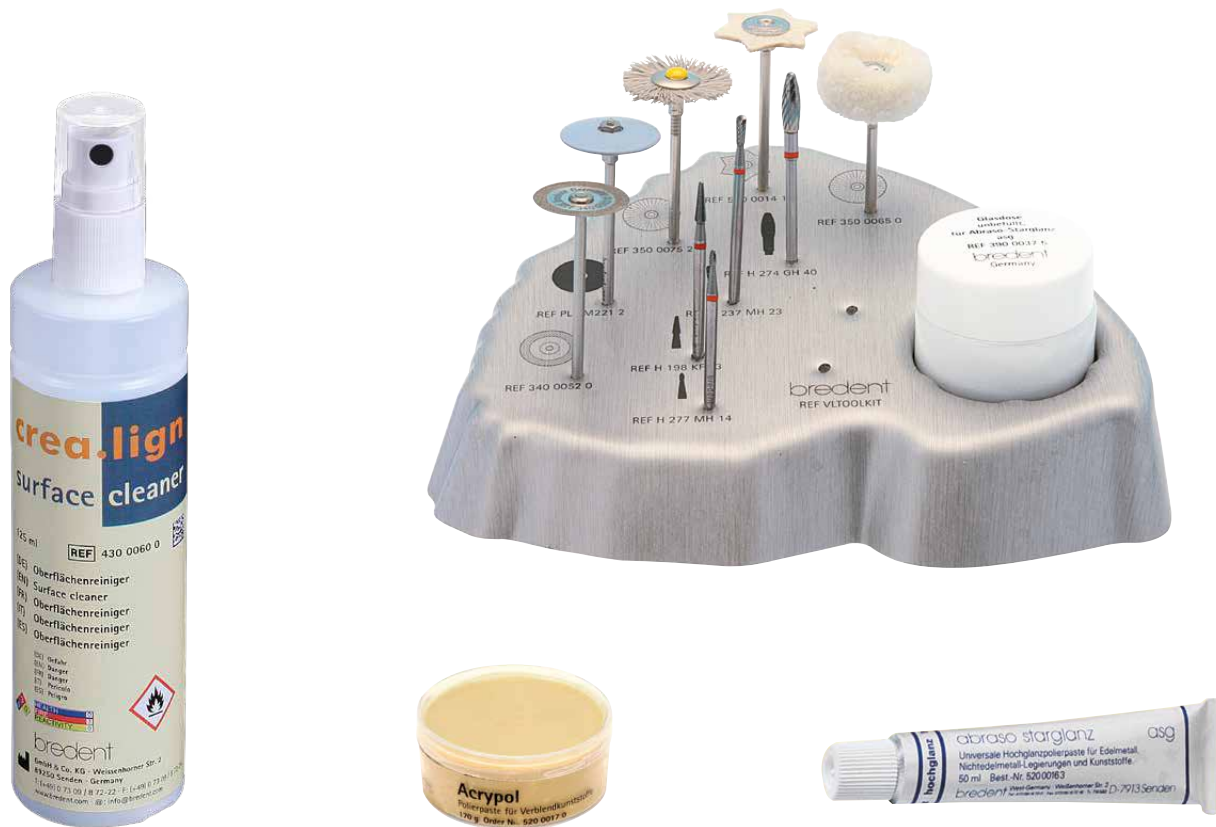

The "Finishing Touch" (La "touche finale")

Le kit d'instruments visio.lign a été optimisé pour la finition des composites comme par ex. les revêtements cosmétiques visio.lign et il comprend des instruments et pâtes à polir pour un finish parfait.

Surfaces en composite comparables à la céramique

En travaillant les matériaux du système cosmétique visio.lign avec le kit d'instruments visio.lign, on arrive à obtenir des surfaces résistantes à la plaque et de teintes stables de même qualité et pérennité qu'une surface céramique.

Avantages du kit d'instruments visio.lign®

- Les fraises à dépouille assurent des surfaces lisses avec moins de travail de polissage
- Des pâtes de prépolissage et de polissage haute brillance font partie du kit
- Disposition des instruments à des hauteurs différentes pour une meilleure préhension
- Boîte en verre amovible pour empêcher le dessèchement des pâtes haute brillance.
- Muni de pictogrammes et de numéros de commande pour une meilleure vue d'ensemble
- Trois places libres pour d'autres instruments

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Instruments et consommables

Porte-seringues crea.lign acier inoxydable



Porte-seringues en acier inoxydable avec guidage en mat. plastique, non garni, pour 6 seringues crea.lign.

Pinceau pour un seul emploi



Pinceau pour un seul emploi adapté au porte-pinceau.

Spatule



La spatule sert à mélanger et à appliquer sommairement des matériaux.

Bloc de mélange, grand



100 mm x 100 mm
100 feuilles

Porte-seringues crea.lign Matière plastique



Dans le porte-seringues crea.lign on peut placer jusqu'à 12 seringues crea.lign à l'inclusion du manche permettant de travailler avec une main.

Porte-pinceaux



Les porte-pinceaux sont prévus pour les pinceaux pour un seul emploi.

Cupules pour un seul emploi



Grand socle avec peu de volume pour recueillir de façon économique le primaire visio.lign (MKZ Primer, K-Primer, activateur MKZ EM et visio.link)

Bloc de mélange, petit



50 mm x 35 mm
100 feuilles

Instruments et consommables



Alimentation rotative pour pâte crea.lign

Alimentation rotative pour toutes les pâtes crea.lign, pour une application facile et ciblée.



Manche pour une main pour gel crea.lign

Manche pour une main pour tous les gels crea.lign en seringues de 5g, pour une application facile et ciblée.



Manche pour une main + Canule d'application pour les seringues de gel cea.lign

Le manche pouvant être manipulé par une seule main a été spécialement conçu pour les seringues de gel crea.lign et avec la canule d'application il facilite à l'utilisateur le dosage plus précis avec une seule main. Grâce au manche pour une main, la seringue repose sûrement dans la main et le gel liquide se laisse facilement doser en tournant le dispositif rotatif cannelé avec le pouce et l'index de la même main. L'autre main reste libre pour d'autres travaux, par ex. pour la préhension de l'objet à travailler.



Canules d'application

Canule d'application opaque pour toutes les seringues crea.lign de 5 g



Pin Cover

Capuchon de protection opaque, adapté à toutes les canules d'application



Thermo-Pen

Le Thermo-Pen est un pistolet thermique avec technique Piezo sans flamme ouverte. Les facettes cosmétiques peuvent ainsi être chauffées sans danger de combustion. La température nécessaire

à la déformation des facettes est de l'ordre de 250° C. Par la dilation les couronnes télescopiques par exemple se laissent mieux revêtir.



Nous recommandons Thermo-Pen pour la déformation thermoplastique

1. Chauffer les facettes

①



2. Ouvrir la facette cosmétique chaude

②



Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Instruments et consommables



Dispensateur pour composite de scellement combo.lign

Appareil distributeur pour toutes les cartouches combo.lign, pour une application facile et sûre du composite de scellement combo.lign

⚠ Cartouche non comprise

Canule de mélange pour le composite de scellement combo.lign



Canule de mélange opaque pour tous les composites de scellement combo.lign

Dispensateur pour silicones visio.sil



Appareil distributeur pour les cartouches visio.sil, visio.sil ILT et visio.sil fix, pour une application simple et ciblée du silicone.

⚠ Cartouche non comprise

Canule de mélange pour le silicone visio.sil fix taille 1



Canule de mélange pour du silicone pour clés à reproduction précise des détails

Canule de mélange pour les silicones visio.sil et visio.sil ILT taille 4



Canule de mélange pour les silicones visio.sil transparents

Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®



Kits de séparation de tiroirs pour



6 x seringues Opaqueur combo.lign



9 x seringues d'opaqueur crea.lign et / ou de pâte crea.lign



24 x novo.lign P et / ou présentoirs de dents neo.lign P



36 x novo.lign A et / ou présentoirs de dents neo.lign A



10 x Gel crea.lign en seringue
3 x manches pour une main



8 x gel crea.lign et / ou seringue de pâte crea.lign
2 x flacons de liquide de cohésion
1 x cartouche en silicone

Les illustrations ne sont pas à l'échelle. Sous réserve d'erreurs et de modifications.



Produit	Produit	Produit	Produit
visio.link			
bre.lux			
Power Unit			
Gnathalex			
crea.lign			
combo.lign			
crea.lign			
combo.lign			
novo.lign			
crea.lign			
Gel			
crea.lign			
Pasta			
visio.paint			
visio.lign.T			

Tableaux de combinaison et de concordances

Repères pour la mise en œuvre des matériaux

	Type de mise en œuvre			
	Revêtement cosmétique avec facette	Stratification librement formée	Stratification librement formée avec Gnathoflex	Stratification librement formée avec clé
Matériau	•			
beauty setup	•			
visio.sil fix	•			
visio.sil	•			
visio.sil ILT	•			•
MKZ Primer	•	•	•	•
Activateur MKZ EM	•	•	•	•
K-Primer	•	•	•	•
visio.link	•	•	•	•
bre.Lux Power Unit	•	•	•	•
Gnathoflex			•	
crea.lign Modelling Liquid	•	•	•	•
combo.lign Opaquer	•			
crea.lign Opaker	•	•	•	•
combo.lign Composite de scellement	•			
novo.lign Verblendschalen	•			
crea.lign Gel	•	•	•	•
crea.lign Pâte	•	•	•	•
visio.paint Teinte de maquillage	•	•	•	•
visio.lign® Toolkit Kit d'instruments pour les composites	•	•	•	•

Temps de polymérisation bre.Lux

pour composants du système visio.lign®

Fabricant	Produit	bre.Lux LED N (lampe à main)		bre.Lux Power Unit (appareil sur socle)		
		Polymérisation finale	Fixation / premier durcissement	Polymérisation intermédiaire	Polymérisation finale	Fonction de premier séchage /réduction
bre.dent	visio.link	30 s	-	-	90 s	40 x (50 %)
bre.dent	Composite de scellement combo.lign	X	15 s	120 s	180 s	-
bre.dent	Gel crea.lign	X	15 s	180 s	360 s	20 x (50%)
bre.dent	Pâte crea.lign	X	15 s	180 s	360 s	-
bre.dent	Opaqueur combo.lign	X	15 s	180 s	180 s	-
bre.dent	Opaqueur crea.lign	-	30 s	180 s	360 s	-
bre.dent	visio.paint	-	40 s	90 s	90 s	-
bre.dent	crea.lign Stains	-	30 s	90 s	90 s	-

180 s Temps de polymérisation

- Non prévu

X Contre-indication

Appareils et temps de photopolymérisation

pour les composants du système visio.lign®, visio.link, combo.lign et crea.lign

Fabricant	Appareil	Longueur d'ondes en nm*	Temps de polymérisation visio.link	Temps de polymérisation combo.lign	Temps de polymérisation Gel crea.lign Opaqueur combo.lign Opaqueur crea.lign
bre.dent	bre.Lux Power Unit	370 - 500	90 s	180 s	6 min
Dentsply / Degudent	Triat, Triat 2000 Eclipse	400 - 500 k. A.	3 min 60 s	6 min 180 s	10 min 6 min
Heraeus Kulzer	Dentacolor XS, Uni XS Heraflash	320 - 520 320 - 520	90 s 90 s	180 s 180 s	6 min 6 min
GC	Labolight LV-III	380 - 490	2 min	5 min	10 min
Ivoclar Vivadent	Targas Power Ofen Lumanat 100	400 - 580 400 - 580	4 min 4 min	180 s 180 s	8 min 6 min
Schütz Dental	Spektra 2000	310 - 500	2 min	180 s	6 min
Shofu Dental	Soltilite EX	400 - 550	90 s	180 s	6 min
Kuraray Dental	CS 110	k. A.	2 min	5 min	8 min
Hager & Werken	Speed Labolight	320 - 550	90 s	180 s	8 min
3M ESPE	Visio BETA (neu P1 - P4) Visio BETA (alt U0 - U3)**	400 - 500 400 - 500	< 4 min (P2) 7 min (U1, U3)	7 min (P2) 15 min (U0)	15 min (P1) 15 min (U0)

* Indications du fabricant

** Nouveau kit de lampes recommandables

Tableau de combinaison des teintes

Opaqueur crea.lign

	Opaqueur crea.lign - Teintes du système								
	Teinte 1	Teinte 2	Teinte 3	Teinte 4	Teinte 5	Teinte 6	Teinte 7	Teinte 8	GUM
Teintes classiques A - D	A1 / B2	A2	A3 / D3	B1 / C1 / BL3	C2 - C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	-

Opaqueur combo.lign

	Opaqueur combo.lign - Teintes du système			
	light	medium	intensiv	GUM
Teintes classiques A - D	A1 - A3 / B1 - B2 / C1 - C2	A3.5 / B3 - B4 / D2 - D3	A4 / C3 - C4 / D4	-

crea.lign Dentin avec Enamel

	Gel crea.lign Enamel - Teintes du système			
	E1	E2	E3	E4
crea.lign Dentin Gel et Pâte				
BL3*	-	-	-	-
Teintes classiques A - D				
A1	•			
A2		•		
A3		•		
A3.5			•	
A4				•
B1	•			
B2		•		
B3			•	
B4			•	
C1	•			
C2			•	
C3			•	
C4				•
D2	•			
D3			•	
D4			•	

* La teinte Bleach BL3 harmonise avec le gel crea.lign Incisal Universal



visio.lign[®]

Systeme cosmétique

Vous trouverez les bons de commande et
d'autres infos concernant le système cosmé-
tique visio.lign[®] sur www.visio-lign.com.

**„Tout ce qui est contre-nature
n'a pas à la longue de chance de survie.“**

- Charles Darwin -

www.visio-lign.com

bredent

Coordonnées pour la France - bredent France: T: 04.75.34.20.96
Coordonnées pour les autres pays francophones: T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 51
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany

F: 04.75.32.05.93
F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44

@: france@bredent.com
@: info@bredent.com
www.bredent.com



Sous réserve d'erreurs et de modifications 0095040F-20151124