


- ① Mit der Dentin-Masse A3,5 oder Modifizier beige – eine Stufe dunkler als die spätere Zahnfarbe – wird der Zahnhals geschichtet.
- ② Mit der Dentin-Masse A3 wird der Zahnkörper und die Mamelons geschichtet.
- ③ Mit visio.pain ebony dünne Schmelzrisse einlegen.
- ④ Abwechselnd Incisal blue und Incisal rose über den Mamelons platzieren.
- ⑤ Incisal blue wird mesial und distal der Schneidekante aufgetragen.
- ⑥ Mit Enamel E2 wird die ganze Schneide aufgebaut.

- ① Mit der Dentin-Masse A3,5 oder Modifizier beige – eine Stufe dunkler als die spätere Zahnfarbe – wird der Zahnhals geschichtet.
- ② Mit der Dentin-Masse A3 wird der Zahnkörper und die Mamelons geschichtet.
- ③ Mit Enamel E2 wird fast die ganze Schneide aufgebaut.
- ④ Mit Incisal opal wird die Form der Schneidekante vervollständig.

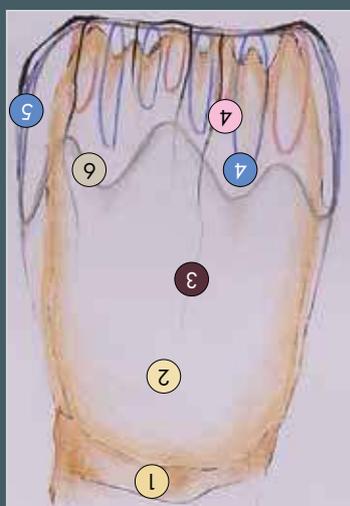

Individuelle Schichtung



Standard-Schichtung

### Zuordnung der Opaker zu den Dentinfarben

crea.lign opaker	1	2	3	4	5	6	7	8	Gum	Z
A-D Farben	A1 B2	A2	A3 D3	BL3/B1 C1	C2/C3 D2/D4	B3 B4	A3,5	A4 C4	Gum	Zirkon- liner

### Zuordnung der Schneiden zu den Dentinfarben

Enamel / A-D Kombination	BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
E1	Univ.	X					X				X				X		
E2			X	X				X									
E3					X				X	X		X	X			X	X
E4						X								X			

### Qualitätscheck der Verblendung

- Ist die Schmierschicht noch vorhanden?
- Entfernen der Schmierschicht mit Technolit (Alkohol) und einer Zahnbürste.
- Nach dem Abdampfen der Politurreste sollte die Verblendung einen Hochglanz besitzen.

### Tipps und Tricks

#### Wenig Platz für die Verblendung:

- Als erste Schicht das farblich passende combo.lign auftragen. Mit den darauf folgenden Schichten unbedingt das combo.lign abdecken, es darf nicht an der Oberfläche liegen um Verfärbungen und Plaqueanlagerungen zu verhindern.

#### Sensible Patienten (Allergiepatienten):

- Um eine 100%ige Polymerisation der Verblendung zu gewährleisten, sollten die angegebenen Polymerisationszeiten eingehalten werden. Die fertiggestellte Arbeit entweder für 1 Stunde bei 55° C in den Drucktopf (Druckbeaufschlagung nicht nötig) geben. Oder kochendes Wasser in ein Gefäß geben und die Arbeit für 30 Minuten einlegen.



