


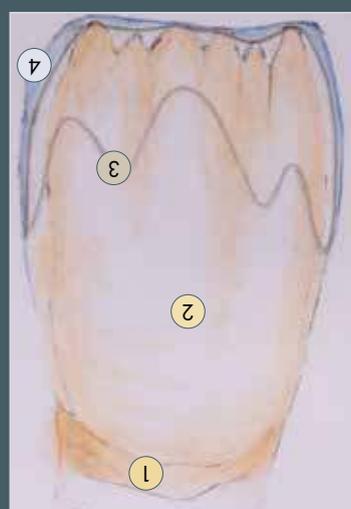


Coordonnées pour la France - bredent France: T: +33 4 75 34 20 96 F: +33 4 75 32 05 93  
 Coordonnées pour les autres pays francophones: T: +49 7309 872-451 F: +49 7309 872-444  
 bredent GmbH & Co. KG - Weissenhorner Str. 2 - 89250 Senden - Germany  
 @: france@bredent.com @: info@bredent.com www.bredent.com

- 1 Avec la masse dentine A3,5 ou le Modifler beige on procède à la stratification de la zone cervicale - avec une nuance plus foncée que la future teinte dentaire.
- 2 Avec la masse dentine A3 continuer la stratification de la dent et des mamelons.
- 3 Avec Enamel E2 reconstruire toute la zone incisale.
- 4 Avec Incisal opal on complète la forme du bord incisif.



Stratification Standard

- 1 Avec la masse dentine A3,5 ou le Modifler beige on procède à la stratification de la zone cervicale - une nuance plus foncée que la future teinte dentaire.
- 2 Avec la masse dentine A3 continuer la stratification de la dent et des mamelons.
- 3 Avec visio-paint ebony imiter de fines fissures d'émail.
- 4 Appliquer alternativement Incisal blue et Incisal rose sur les mamelons.
- 5 Incisal blue se place sur la face mésiale et distale du bord incisif.
- 6 Avec Enamel E2 on reconstruit toute l'incisive.

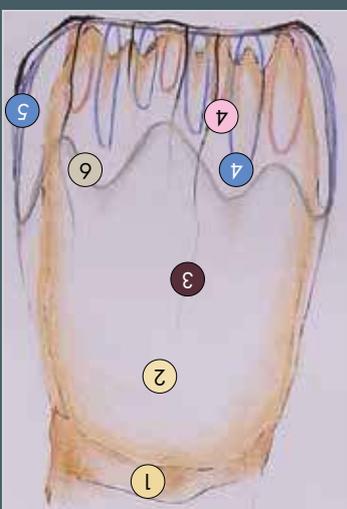

Stratification personnalisée

### Affectation des opaques aux teintes dentine

Opaquer combo.lign	1	2	3	4	5	6	7	8	Gum	Z
Teintes A-D	A1 B2	A2	A3 D3	BL3/B1 C1	C2/C3 D2/D4	B3 B4	A3,5	A4 C4	Gum	Zircon- liner

### Affectation des Incisives aux teintes dentine

Enamel / A-D Combinaison	BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
E1	Univ.	X					X				X				X		
E2			X	X				X									
E3					X				X	X		X	X			X	X
E4						X								X			

### Contrôle de qualité du revêtement cosmétique

- La boue dentinaire - est-elle encore présente?
- Enlever la boue dentinaire avec Technolit (alcool) et à l'aide d'une brosse à dents.
- Après avoir passé les restes de polissage à la vapeur, le revêtement cosmétique présente une haute brillance parfaite.

### Conseils et tours de main

#### Peu de place pour le revêtement cosmétique:

- En tant que première couche appliquer le combo.lign de teinte adaptée. Pour les couches suivantes, impérativement protéger combo.lign qui ne doit pas se trouver en surface pour empêcher des décolorations et des dépôts de plaque.

#### Patients sensibles (patients souffrant d'allergies):

- Pour assurer une polymérisation à 100% du revêtement cosmétique, veuillez respecter les temps de polymérisation indiqués. Mettre le travail terminé pour 1 heure dans une cocotte à 55° C (une mise sous pression n'est pas nécessaire). Ou bien mettre de l'eau bouillante dans un récipient et y déposer l'ouvrage durant 30 minutes.



Coordonnées pour la France - bredent France: T: +33 4 75 34 20 96 F: +33 4 75 32 05 93  
 Coordonnées pour les autres pays francophones: T: +49 7309 872-451 F: +49 7309 872-444  
 bredent GmbH & Co. KG - Weissenhorner Str. 2 - 89250 Senden - Germany  
 @: france@bredent.com @: info@bredent.com www.bredent.com



