

Presentación del sistema

por capas



crea.lign

revestir



novo.lign

montaje



neo.lign

fresar



visio.CAM

maquillar



visio.paint

unión



bond.lign

visio.lign

Sumario de los capítulos

1

Preparación del trabajo
prepare natural beauty



Siliconas para llaves

08

2

crea.lign
create natural beauty



Composite de revestimiento
Maquillaje, visio.paint – colour natural beauty
Líquido para modelado
Kits

12
18
18
21



3

novo.lign
veneer natural beauty



Carillas
Kits

28
37

4

neo.lign
choose natural beauty



Dientes completos
Kits

42
51

5

bond.lign
secure natural beauty



Imprimación y adhesivo	54
Opaquizante	56
Composite de fijación	58
Adhesivo DTK	58
Kits	60

6

visio.CAM
design natural beauty



Blanks de composite	64
---------------------	----

7

Tools
support natural beauty



bre.Lux	68
visio.lign Toolkit	72
crea.lign Gel	73
crea.lign Paste	74
novo.lign	74
bond.lign	75
Preparación del trabajo	75
visio.lign Armario/caja para dientes	76
Matriz para el procesamiento del material	77
Publicaciones	78
Índice	80

1

Preparación del trabajo

prepare natural beauty



ENTRE LAS EXCELENTE
CARACTERÍSTICAS DE LAS
SILICONAS DE TRAZO
FINO PARA LLAVES VISIO.SIL
DESTACAN SU APLICACIÓN
DE GRAN PRECISIÓN, LAS
IMPRESIONES TOMADAS
CON GRAN DETALLE Y SU
TRANSPARENCIA.

SILICONAS PARA LLAVES

Preparación del trabajo

Siliconas para llaves



visio.sil fix

Silicona para detalles finos para llaves

Dureza aprox. 55 ShoreA

visio.sil fix es una silicona de curado por adición para llaves que permite obtener detalles finos. Con visio.sil fix puede realizarse la toma de impresión de los espacios interdientales y el modelado de la encía para el montaje de cera con suma perfección,

representando hasta el último detalle. Tras confeccionar la restauración, ya sólo quedará realizar el pulido hasta obtener un brillo intenso. De este modo se ahorra trabajo y tiempo.



amarillo

REF 54001300

50 ml



visio.sil

Silicona transparente para llaves,

dureza aprox. 60 ShoreA

visio.sil es una silicona transparente de curado por adición para la fabricación de llaves translúcidas usadas en el procesamiento de materiales fotopolimerizables.



Ventaja: de las siliconas

transparentes para llaves visio.sil y visio.sil ILT

Las siliconas para llaves visio.sil y visio.sil ILT son translúcidas. Esto permite polimerizar las carillas que se va a adherir sin tener que quitar la llave.



transparente

REF 54001200

50 ml



visio.sil ILT

Silicona transparente para llaves al usar la técnica de estratificación inversa, dureza aprox. 75 ShoreA

visio.sil ILT se desarrolló especialmente para la técnica de estratificación inversa. Esta silicona transparente para llaves, de curado por adición, destaca por su gran dureza de unos 75 Shore A. Tiene buena fluidez para reproducir el espacio interdental y copiar

perfectamente la textura de la superficie, pero al mismo tiempo es estable y puede aplicarse con precisión.

visio.sil ILT puede insertarse en la boca del paciente después de haberse curado (producto sanitario de la clase I).



transparente

REF 54001400

50 ml



Ventaja de la silicona transparente para llaves visio.sil ILT


visio.sil ILT es una silicona para llaves homologada para su uso en boca y es idónea para el posicionamiento y la adhesión de carillas indirectas.

2



crea.lign

create natural beauty

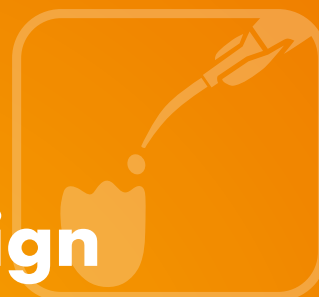

EL COMPOSITE CERÁMICO
FOTOPOLIMERIZABLE
CONVENCE POR SU
OPALESCENCIA NATURAL Y
UNA TRANSMISIÓN ÓPTIMA
DE LA LUZ, CONSIGUIENDO
UNA BELLEZA NATURAL.

COMPOSITE DE
REVESTIMIENTO
MAQUILLAJES
LÍQUIDO PARA EL MODELADO

crea.lign | Composite para revestimiento

create natural beauty - belleza natural con el composite fotopolimerizable de cerámica

crea.lign es un composite fotopolimerizable de cerámica para el revestimiento permanente de estructuras de metal, cerámica y polímero. Sus excelentes cualidades permiten adaptar la elasticidad y la dureza de crea.lign a los diferentes materiales usados en las estructuras.

crea.lign, cuyo relleno es exclusivamente nanomaterial, no contiene partículas de relleno de vidrio molido y consta en aproximadamente un 50 % de partículas cerámicas opalizantes y de una matriz de oligómero de alta resistencia.

Al haber prescindido de las duras partículas de relleno de vidrio, los materiales de relleno cerámico usados proporcionan una mayor resistencia a la abrasión, a la vez que evitan la adhesión de placa, los cambios de color y la fragilización del material.

Se evita, por un lado, los efectos de la aglomeración de material (formación de grumos); por otro lado, el tamaño de las partículas de unos 40 µm, así como las óptimas propiedades de crea.lign, para un excelente pulido, permiten conseguir una superficie homogénea y densa. Gracias a la densidad obtenida en la superficie, la absorción de agua es reducida, lo que garantiza una buena resistencia mecánica.



crea.lign | Codificación

crea.lign Gel: **LOT** CLFN_____

Dentin, p. ej. A3:	LOT CLFN DA30
Transpa clear, p. ej. T1:	LOT CLFN 00T1
Incisal, p. ej. I1:	LOT CLFN 00I1
Incisal Enamel, p. ej. E1:	LOT CLFN 00E1
GUM, p. ej. G1:	LOT CLFN 00G1
Modifier, p. ej. M1:	LOT CLFN 00M1
Stains, p. ej. S1:	LOT CLFN 00S1

crea.lign Paste: **LOT** CLPND_____

Dentin, p. ej. A3:	LOT CLPND A30
Transpa opal, p. ej. T1:	LOT CLPN 00T1
Incisal, p. ej. E1:	LOT CLPN 00E1
GUM, p. ej. G50:	LOT CLPN 0G50
—	—
—	—

Belleza natural

- Opalescencia natural
- Efecto óptimo de profundidad gracias al ajuste del índice de refracción de la luz
- Translucencia (mayor margen de libertad que con la cerámica)



crea.lign está disponible en dos formatos: gel y pasta, en los colores clásicos A - D, así como los de otras masillas incisales y de encías, por lo que permite su perfecta combinación con estos materiales.

crea.lign | Ventajas

Efecto natural: el equilibrio entre la opalescencia, la fluorescencia y la translucencia consigue un color de efecto vivo y natural.

Fisiología: crea.lign es mucho más resistente a los impactos que la cerámica gracias a sus óptimas propiedades mecánicas. El resultado es un revestimiento más resistente.

Seguridad: la duradera unión mediante adhesión química de crea.lign con todos los materiales de estructuras, así como su resistencia frente a la placa dental y la tinción, garantizan el éxito a largo plazo del revestimiento.

crea.lign Gel es la variante más líquida de los dos formatos del composite de revestimiento crea.lign. El mango especialmente desarrollado para trabajar con una mano y la cánula de aplicación facilitan la dosificación exacta al usuario.

crea.lign Paste es la versión pastosa de los dos formatos disponibles de crea.lign. La consistencia de la pasta crea.lign es blanda y suave, por lo que resulta fácil de moldear sin el indeseado efecto de adhesión. Con el composite shaper kit, el modelado resulta más fácil todavía, pues este conjunto de instrumental de silicona para el modelado se ha desarrollado especialmente para crea.lign Paste y se utiliza para ayudar en la aplicación y el modelado. De este modo se consigue fácilmente transiciones finas en el modelado.

- ➔ Todos los colores de crea.lign Gel y crea.lign Paste pueden consultarse en las páginas 16 y 17.
- ➔ crea.lign Opaker, véase la página 57.
- ➔ Tablas de combinación de colores, véase la página 17.



crea.lign Gel



crea.lign Paste

crea.lign | Gel

BL3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30
	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

E1	E2	E3	E4	opal	blue	rose	universal
E1	E2	E3	E4	I1	I2	I3	I4
				I5*			
				I5			

*C.G.S. finish

REF CLFND _ _ _



Gel Dentin

está disponible en los colores clásicos A-D y el color bleach BL3.

REF CLFN00 _ _



Gel Incisal

Los colores crea.lign Incisal (opal/blue/rose/universal/C.G.S.finish) se usan junto con las masillas de esmalte (E1/E2/E3/E4) para realzar en particular la zona incisal (véase también la tabla de combinación de colores de las masillas de esmalte y dentina en la página 17).

clear

T1

T1

REF CLFN00 _ _



Gel Transpa Clear

crea.lign Gel Transpa clear es la variante transparente de crea.lign Gel. Su transparencia consigue caracterizaciones translúcidas de excelente estética al combinar crea.lign Transpa clear con las pinturas de maquillaje visio.paint.

light	rosa	pink	red
G1	G2	G3	G4
G1	G2	G3	G4

REF CLFN00 _ _



Gel GUM

crea.lign Gel GUM (light/rosa/pink/red) son masillas para la personalización en la zona de la encía.

beige	oliv	caramel	lila	umbra
M1	M2	M3	M4	M5
M1	M2	M3	M4	M5

REF CLFN00 _ _



Gel Modifier

(beige/oliv/caramel/lila/umbra) son geles de colores más intensos, p. ej. para destacar la zona del cuello o imitar manchas de cal.

orange	brown
S1	S2
S1	S2

REF CLFN00 _ _



Stains

crea.lign Stains (brown/orange) son masillas fotopolimerizables intensas y se aplican para personalizar mediante colores los revestimientos de composite. Las crea.lign Stains no requieren una estratificación de capas, se usan para enfatizar, p. ej. espacios interdentales, bordes incisales y fisuras.

crea.lign | Paste

BL3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30
	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

REF CLPND _ _ _



3 g

Paste Dentin

está disponible en los colores clásicos A-D y el color bleach BL3.

E1	E2	E3	E4
E1	E2	E3	E4

REF CLPN00 _ _



3 g

Paste Incisal

Está disponible, al igual que crea.lign Gel, en 4 tonalidades (E1/E2/E3/E4) y se usa para la creación de la zona incisal. Las masillas incisales están perfectamente armonizadas con las masillas para dentina (véase la tabla más adelante en esta página).

opal

T1

T1

REF CLPN00 _ _



3 g

Paste Transpa Opal

Es la versión transparente de crea.lign Paste. Gracias a su óptima translucencia y opalescencia proporciona un efecto de color vivo y natural.

bright	PL light	PO opak	orange	brown
G20	G30	G40	G50	G60

REF CLPNO _ _ _



3 g

Paste GUM

crea.lign Paste GUM (light/opak/bright/orange/brown) se usa para la estratificación de la parte de la encía con el fin de conseguir una personalización del rojo y blanco.

crea.lign | Tabla de combinación de colores

crea.lign Gel/Paste*	Colores clásicos A - D																
	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL3
Enamel																	
E1	■					■				■				■			■
E2		■	■				■										
E3				■				■	■		■	■			■	■	
E4					■								■				

* Todas las masillas crea.lign Gel pueden combinarse perfectamente con todas las masillas crea.lign Paste.

visio.paint | Surtido de colores de maquillaje



REF 540012 __ El código del color completa la **REF**:



white

5 1



blue

5 2



black

5 3



ivory

5 4



ocher

5 5



ebony

5 6

Las pinturas líquidas y fotopolimerizantes visio.paint (white/blue/black/ivory/ocher/ebony) se aplican mediante la técnica Cut-Back o directamente mediante estratificación. La pintura superficial sólo se recomienda en restauraciones provisionales. Mediante la superposición de capas de composite se mantiene el efecto del color. Con las pinturas visio.paint puede intensificarse todas las resinas PMMA y los composites habituales.

REF 54001250

6 colores x 3 ml

crea.lign | Modelling Liquid



REF CLFMOD10

10 ml

Con el líquido para modelar crea.lign puede aumentarse la fluidez de la pasta y del gel crea.lign. Al añadir líquido se reduce asimismo el módulo de elasticidad de las masillas, aumentándose así la elasticidad y expansión de las masillas crea.lign. Además, permite en

la personalización del rojo y blanco una transición homogénea de la resina de la prótesis al composite crea.lign. Las masillas crea.lign son resistentes frente a la pérdida de color y la placa dental.

⚠ En la mezcla con crea.lign, la proporción del líquido para modelar no debe superar el 30 %.



crea.lign Sistema de revestimiento
pasta + gel, kit completo



crea.lign | Kits

REF CLIGNSETFK crea.lign Sistema de revestimiento pasta + gel, kit completo

Maletín de aluminio,
ancho 42,5 cm x alto 43,5 cm x profundo 20,5 cm



Modelling Liquid
10 ml

1 x

visio.link

10 ml

1 x

Cuencos de un único uso

1 x 12

Bloc para mezclas

2 x

MKZ-Primer
5 ml

1 x

MKZ EM-Aktivator

4 ml

1 x

K-Primer

4 ml

1 x

Espátula

1 x

El surtido contiene todos los colores disponibles de los siguientes componentes:

- crea.lign Opaker
- crea.lign Paste
 - Dentin · Transpa opal
 - Incisal · GUM
- crea.lign Gel
 - Incisal · Transpa clear
 - Dentin · Modifier
 - GUM
- crea.lign Stain
- visio.paint


➔ véase las páginas 16/17

Imprimación y activador

➔ véase las páginas 54/55

crea.lign Portajeringas
acero inoxidable

2 x

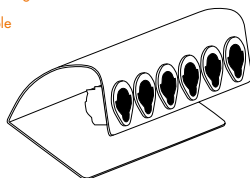

Pincel de un único uso

20 x



Portapinceles

1 x




crea.lign Paste Incisal, 3 g

4 x



crea.lign Paste Transpa opal, 3 g

1 x

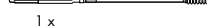

crea.lign Paste Dentin, 3 g

17 x



crea.lign Paste GUM, 3 g

5 x




Dispensador giratorio

27 x



crea.lign Mango monomando
jeringa con UV-LED

12 x

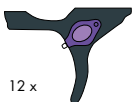

Capuchón

2 x 10




Cánula de aplicación

2 x 10



crea.lign Gel Incisal, 5 g

9 x

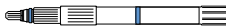

crea.lign Gel Transpa clear, 5 g

1 x



crea.lign Gel Dentin, 5 g

17 x



crea.lign Gel Modifier, 5 g

5 x




crea.lign Gel GUM, 5 g

4 x




crea.lign Paleta de colores, tonos dentin
(vacío)

1 x

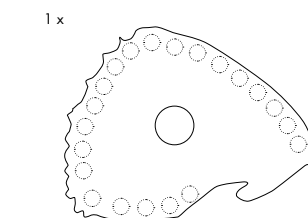

crea.lign Paleta de colores Incisal, Stains y GUM
(vacío)

1 x

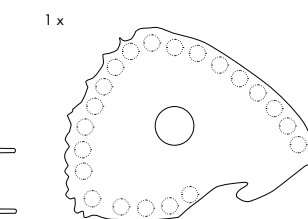

visio.paint Set
3 ml

1 x 6




crea.lign Stain, 1,4 g

2 x



crea.lign Opaker, 4 g


11 x

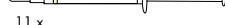

visio.lign Carpeta con información

con diferentes herramientas para imprimir, como, p. ej. el manual crea.lign freestyle y un presentador de sobremesa con instrucciones para el estratificado mediante imágenes.

1 x

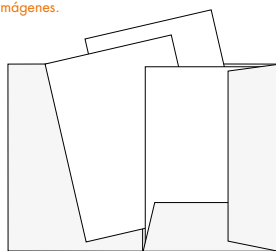


crea.lign Composite Shaper Kit

1 x tres puntas

1 x cono

1 x espátula

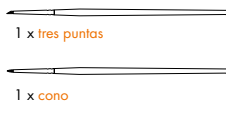


1 x garra

1 x pala de ciervo




REF CLIGNSET12**crea.lign Kit con portajeringas**

crea.lign Portajeringas
de plástico

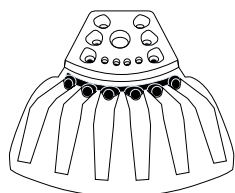

1 x

crea.lign Unidad mango
jeringa con UV-LED

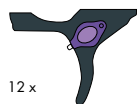

12 x

Capuchón

2 x 10



Cánula de aplicación

2 x 10




Modelling Liquid, 10 ml

1 x



crea.lign Stain, 1,4 g

2 x

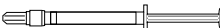

crea.lign Stains y Gel

Colores a elegir,

➔ véase la página 16

crea.lign Gel, 5 g

12 x



crea.lign Paste, 3 g

9 x



Dispensador giratorio

9 x



crea.lign Composite Shaper Kit

1 x tres puntas

1 x cono

1 x espátula

1 x garra

1 x pala de ciervo


crea.lign Paste

Colores a elegir,

➔ véase la página 17

REF CLPNSET10**crea.lign Paste Kit de inicio con 10 masillas**

Portajeringas para crea.lign Paste

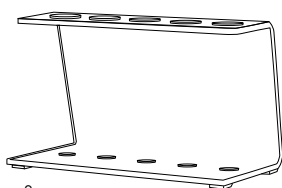

2 x

crea.lign Paste Dentin, 3 g



- 1 x A2
- 1 x A3
- 1 x A3,5
- 1 x B3
- 1 x C3
- 1 x D3

crea.lign Paste Enamel, 3 g



- 1 x E1
- 1 x E2
- 1 x E3

crea.lign Paste Transpa opal, 3 g



- 1 x T1

Bloc para mezclas

1 x



Dispensador giratorio

10 x



REF CLPNSETFK

crea.lign Paste Kit completo

crea.lign Paste Dentin, 3 g



17 x

Dispensador giratorio



27 x

visio.link
10 ml

1 x




crea.lign Paste

Colores a elegir,

→ véase la página 17

crea.lign Paste GUM, 3 g

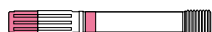

5 x

crea.lign Paste Incisal, 3 g



4 x

crea.lign Opaker, 4 g



10 x

Modelling Liquid
10 ml

1 x



crea.lign Paste Transpa opal, 3 g



1 x

crea.lign Opaker Z,
liner para circonio 4 g

1 x

crea.lign
surface cleaner
125 ml

1 x



crea.lign Composite Shaper Kit



1 x tres puntas



1 x garra



1 x cono



1 x pata de ciervo



1 x espátula

crea.lign freestyle Kit iniciación

REF CLFKSETA20

A2

o

REF CLFKSETA30


A3

o

REF CLFKSETA35

A3,5

1 x crea.lign Gel Dentin, 5 g

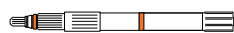


1 x crea.lign Paste Dentin, 3 g



1 x crea.lign Gel Incisal, 5 g



1 x crea.lign Opaker, 4 g

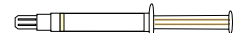


El crea.lign Gel Incisal y crea.lign Opaker de este kit se suministra en los colores que se ajustan a los elegidos para el surtido (A2, A3 o A3.5).

REF CLIGNSETG


Kit para la estética del rojo y blanco

visio.lign Caja de cartón plegable

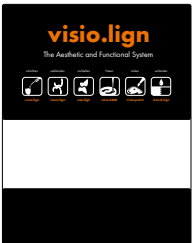

1 x

Instrucciones para la estratificación

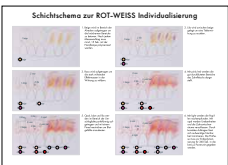

1 x

Unique Brush N°. 4



1 x

Modelling Liquid
10 ml

1 x



visio.link
10 ml

1 x



Prótesis de muestra

2 x



Capuchón

1 x 10



Cánula de aplicación

1 x 10




Bloc para mezclas

1 x



crea.lign Unidad mango
jeringa con UV-LED

1 x

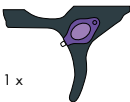

crea.lign Gel Incisal, 5 g

1 x



1 x I1 opal

1 x I2 blue

crea.lign Gel Transpa clear, 5 g

1 x



1 x T1 transpa clear

crea.lign Gel Modifier, 5 g

1 x



1 x M1 beige

1 x M4 lila

crea.lign Gel GUM, 5 g

1 x



1 x G1 light


1 x G2 rosa

1 x G3 pink

1 x G4 red

crea.lign Opaquer, 4 g


1 x

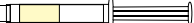

1 x GUM

crea.lign Paste GUM, 3 g

5 x

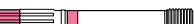

1 x bright

1 x PL light

1 x PO opak

1 x orange


1 x brown

REF CLIGNSETN

crea.lign N Surtido de introducción

crea.lign Unidad mango
jeringa con UV-LED

3 x

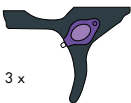

crea.lign Gel, 5 g

10 x



crea.lign Gel

Colores a elegir,

➔ véase la página 16

REF 54001250

visio.paint Surtido de colores de maquillaje


Pincel de un único uso

6 x



Portapinceles

1 x

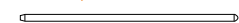

visio.paint

3 ml



1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

visio.paint

➔ véase la página 18

REF CLIGNSET3A

crea.lign Kit de ensayo, colores A2, A3, A3,5

Cánula de aplicación

1 x 10




crea.lign Paste Dentin, 3 g



- 1 x A2
- 1 x A3
- 1 x A3,5

Dispensador giratorio

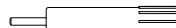

3 x

Capuchón

1 x 10



crea.lign Gel Enamel e Incisal, 5 g



- 1 x E2
- 1 x E3
- 1 x I1 opal
- 1 x I2 blue

crea.lign Composite Shaper Kit



1 x tres puntas



1 x garra



1 x cono



1 x pata de ciervo



1 x espátula

Modelling Liquid
10 ml

1 x



crea.lign Gel Dentin, 5 g



- 1 x A2
- 1 x A3
- 1 x A3,5

crea.lign Gel Transpa clear, 5 g



- 1 x T1

crea.lign Unidad mango
jeringa con UV-LED


1 x

crea.lign Gel GUM, 5 g



- 1 x G1 light
- 1 x G2 rosa
- 1 x G3 pink
- 1 x G4 red

crea.lign Opaker, 4 g

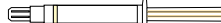

- 1 x A2
- 1 x A3
- 1 x A3,5

Unique Brush N°. 4



1 x

Bloc para mezclas



1 x

MKZPrimer
5 ml

1 x





REF VLTOOLKIT

visio.lign Tool Kit para el repaso de revestimientos de composite

Soporte para herramientas rotatorias y bote de vidrio de
Abraso-Starglanz (bote de vidrio vacío)

1 x

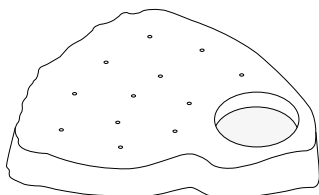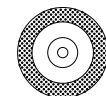Disco diamantado
a ambos lados montado,
flexible, Ø 19 x 0,23 mm

1 x

Ceragum medio
lenteja
Ø 22 x 4 mm

12 x

Abraso-fix Cepillo redondo
extrafino, amarillo
Ø 22 mm

8 x

Cepillo de estrella
pelo de cabra blanco
Ø 13 mm


15 x

Disco de algodón
Ø 22 mm

15 x

Fresa de carburo de tungsteno
Ø 1,4 mm - huevo


1 x

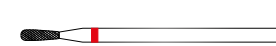Fresa de carburo de tungsteno
Ø 2,3 mm - pera

1 x

crea.lign
surface cleaner
125 ml


1 x

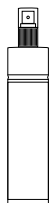Bote de vidrio vacío para
Abraso-Starglanz

1 x

Fresa de carburo de tungsteno
Ø 4,0 mm - granada

1 x

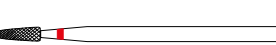Fresa de carburo de tungsteno
Ø 2,3 mm - cónico redondo

1 x

Mandril rápido,
t. 2

1 x

Abraso-Starglanz
Crema de alto brillo
50 ml

2 x

Acrypol
pasta de brillo Crema para brillo
170 g

1 x

3

novo.lign veneer natural beauty



LAS CARILLAS DE REVESTIMIENTO NOVO.LIGN CONVENCEN POR SUS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS. CON LAS IMPRIMACIONES Y LOS ADHESIVOS CORRESPONDIENTES PUEDEN MONTARSE SOBRE CUALQUIER MATERIAL ESTRUCTURAL Y COMPLETARSE CON CREA.LIGN. GRACIAS A QUE SUS COLORES Y FORMAS SON LOS MISMOS QUE LOS DE LOS DIENTES COMPLETOS NEO.LIGN, PUEDE COMBINARSE AMBOS PERFECTAMENTE.

CARILLAS

CARACTERÍSTICAS

Cuello del diente ancho para cubrir coronas anchas. Ajustable de forma personalizada mediante aplicación de calor.

Cuello del diente largo para cubrir dientes alargados.

Estructura natural de mamelón y estratificación con un grosor de tan solo 1 mm.

Con alas especiales para cerrar el espacio interdental. Así se evita huecos negros y espacios que recojan suciedad.

Sin estrechamiento en el cuello para ajustar el perfil de la encía de forma personalizada.

Formación óptima del punto de contacto.

Borde incisal profundo para una transición óptima hacia el material complementario.

Las carillas de revestimiento novo.lign constan de un composite de alta resistencia de PMMA con relleno microcerámico y se usan para el revestimiento duradero de estructuras de metal, cerámica y polímeros. Sus formas se han obtenido de arcadas dentales reales, por lo que su aspecto es completamente natural. La estratificación morfológica proporciona además un efecto natural de profundidad al revestimiento. Gracias a unos valores mecánicos excelentes, como

una gran resistencia a la rotura por flexión (140 MPa) y un módulo de elasticidad bajo (aprox. 3000 MPa), las carillas fisiológicas de revestimiento proporcionan un efecto amortiguador, lo que las hace óptimas para la técnica protésica implantar. Su superficie homogénea y densa les confiere una gran durabilidad del color y resistencia a la placa dental. Sus colores y formas son idénticos a los de los dientes completos neo.lign, por lo que pueden combinarse perfectamente.

Las carillas de revestimiento novo.lign están disponibles con formas de dientes anteriores y posteriores.

Las formas de dientes posteriores permiten la creación de cualquier concepto de oclusión gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias de las formas G, W y L.



- Las formas W, con ancho «extraordinario», son más adecuadas que las «delgadas» formas G para revestir estructuras de coronas y puentes más voluminosas W ...
- ... las formas L con diseño «lingualizado» de las superficies masticatorias son idóneas para la construcción de soluciones protésicas totales implantosoportadas.

Todas las formas de dientes anteriores y posteriores novo.lign están disponibles en los colores clásicos A - D, así como en el color bleach-BL3.

novo.lign

novο.lign | Codificación

Todas las tablillas de dientes de las carillas novo.lign llevan impresas las inscripciones en color plata.

novο.lign A



La **A** indica que es anterior, e incluye todas las formas de dientes anteriores para arcada superior e inferior.

Forma del diente, p. ej. **D49**

Color del diente, p. ej. **A3**

novο.lign P


Formas G



P indica que es posterior, e incluye todas las formas de dientes posteriores para arcada superior e inferior.

En las variantes de las carillas de revestimiento de novo.lign P se diferencia entre las formas G, W y L.



Formas W

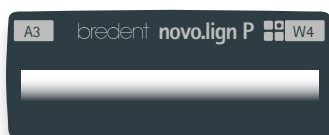

Tanto las formas G como las formas W y las formas L están disponibles en diferentes tamaños. El tamaño se ha identificado mediante números. A mayor tamaño, mayor número. Las formas G de las carillas están disponibles en los tamaños 3 y 4; las formas W están disponibles en los tamaños 1, 2 y 3; y las formas L están disponibles en los tamaños 2 y 3.

➔ Véase las tablas de tamaños en la página 31.

Formas L

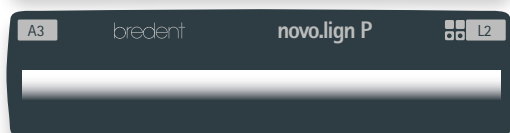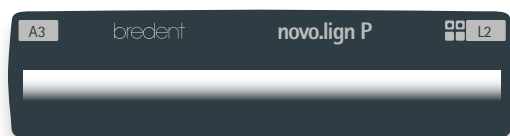

Las formas G y W están agrupadas por cuadrantes, es decir, que en una tablilla de dientes se encuentran, por ejemplo, premolares y molares de la arcada inferior del 3.º cuadrante de una forma y tamaño, p. ej. **W4**.

Sobre las tablillas de dientes de las formas G, W y L se ha representado los cuatro cuadrantes con cuatro cuadritos. El cuadrante correspondiente está marcado con un punto.

Las formas L de las carillas novo.lign P están disponibles en dos tamaños, **L2** y **L3**. Las tablillas de dientes llevan o bien 6 dientes posteriores de la arcada superior (16, 15, 14, 24, 25 y 26) o bien 6 dientes posteriores de la arcada inferior (46, 45, 44, 34, 35 y 36).

novο.lign | Colores y formas

novο.lign A

Anterior / dientes anteriores



Grosor del tabique bucal
1,0 mm

- 12 formas de maxilar superior
- 3 formas de maxilar inferior



Variedad sistematizada

novο.lign P

Posterior / dientes posteriores

Formas G



Grosor del tabique bucal
1,2 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Formas L



Grosor del tabique bucal
1,0 mm

- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias, para prótesis totales

Formas W



Grosor del tabique bucal
0,8 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión
- Forma anatómica «extra» ancha, especialmente recomendada para revestir coronas y puentes.

Disponible en los siguientes tamaños



pequeño grande

Disponible en los siguientes tamaños



pequeño grande

Disponible en los siguientes tamaños



pequeño grande

Todas las formas de novο.lign A y novο.lign P están disponibles en los siguientes colores:



novo.lign | Elección del diseño

Maxilar superior



C43

REF VOC43 _ _ _ S



H46

REF VOH46 _ _ _ S



A44

REF VOA44 _ _ _ S



S46

REF VOS46 _ _ _ S



F44

REF VOF44 _ _ _ S



I47

REF VOI47 _ _ _ S



I45

REF VOI45 _ _ _ S



D48

REF VOD48 _ _ _ S

Arcada inferior anterior



T35

REF VUT35 _ _ _ S



D38

REF VUD38 _ _ _ S

El código del color completa la REF:



B L 3



A 1 0



A 2 0



A 3 0



A 3 5



A 4 0



B 1 0



B 2 0



M48

REF VOM48 _ _ _ S



D49

REF VOD49 _ _ _ S



B51

REF VOB51 _ _ _ S



K53


REF VOK43 _ _ _ S



D41


REF VUD41 _ _ _ S

Arcada superior/inferior posterior

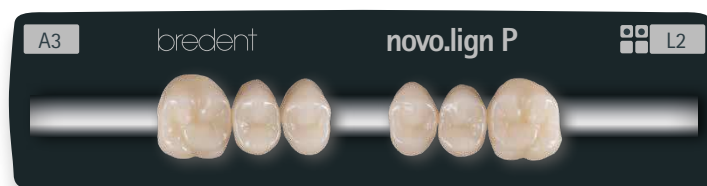


L2

REF VOWL2 _ _ _

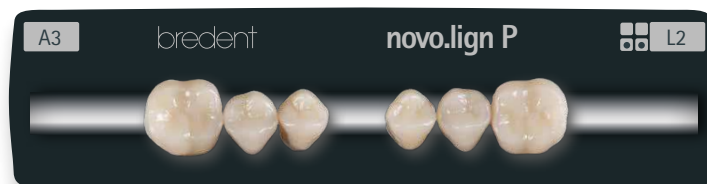


L2

REF VUWL2 _ _ _

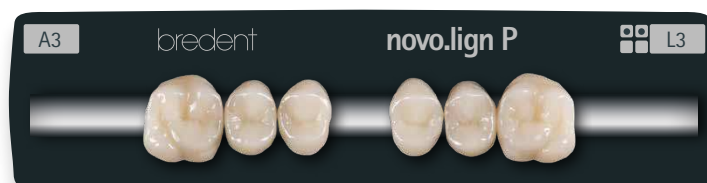

L3

REF VOWL3 _ _ _

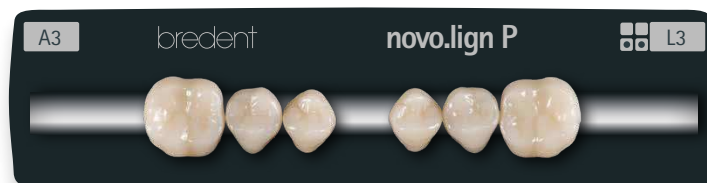

L3

REF VUWL3 _ _ _

→ Otros diseños posteriores, véase las páginas 34 y 35.



B 3 0



B 4 0



C 1 0



C 2 0



C 3 0



C 4 0



D 2 0



D 3 0



D 4 0

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.

novo.lign | Elección del diseño

Arcada superior/inferior posterior



W3

REF VO1W3 _ _ _



W3

REF VO2W3 _ _ _



W4

REF VO1W4 _ _ _



W3

REF VU4W3 _ _ _



W3

REF VU3W3 _ _ _



W4

REF VU4W4 _ _ _



G3

REF VO1G3 _ _ _



G3

REF VO2G3 _ _ _



G4

REF VO1G4 _ _ _



G3

REF VU4G3 _ _ _



G3

REF VU3G3 _ _ _



G4

REF VU4G4 _ _ _

El código del color completa la REF:



B L 3



A 1 0



A 2 0



A 3 0



A 3 5



A 4 0



B 1 0



B 2 0



W4

REF VO2W4 _ _ _



W5

REF VO1W5 _ _ _



W5

REF VO2W5 _ _ _



W4

REF VU3W4 _ _ _



W5

REF VU4W5 _ _ _



W5

REF VU3W5 _ _ _



G4

REF VO2G4 _ _ _



G4

REF VU3G4 _ _ _

→ Otros diseños posteriores, véase las página 33



B 3 0



B 4 0



C 1 0



C 2 0



C 3 0



C 4 0



D 2 0



D 3 0



D 4 0


Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.



REF VLIGNSET2

visio.lign Sistema de carillas novo.lign A + P, kit de iniciación 2

visio.lign Armario/caja para dientes

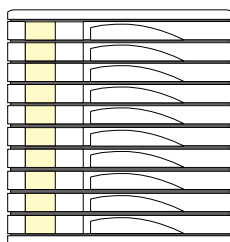


1 x

novo.lign A Carillas de revestimiento - dientes anteriores



10 tablillas de dientes

novo.lign P Carillas de revestimiento - dientes posteriores

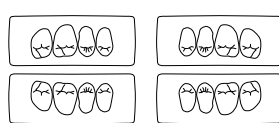

visio.link, 10 ml




1 x

combo.lign Cánula para mezclas, t. 2



1 x 10

combo.lign Composite de fijación, 8 g

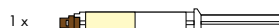

1 x

Surtido de un color elegido por el usuario

➔ Colores clásicos de A a D y color bleach BL3


novo.lign A y P - Tablillas de dientes
Carillas de dientes anteriores y posteriores, con las formas elegidas por el usuario
➔ véase las páginas 32 a 35.

novo.lign P - Tablillas de dientes
Carillas de dientes posteriores, con las formas elegidas por el usuario
➔ Tablas con los tamaños, véase la página 31.

REF VLIGNSET3

visio.lign visio.lign Sistema de carillas, kit de iniciación 3

visio.lign Armario/caja para dientes

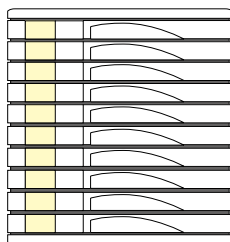


1 x

novo.lign A Carillas de revestimiento - dientes anteriores



13 tablillas de dientes

novo.lign P Carillas de revestimiento - dientes posteriores

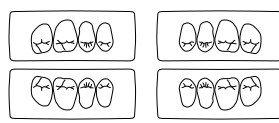


8 tablillas de dientes

crea.lign Unidad mango jeringa con UV-LED




2 x

visio.link, 10 ml

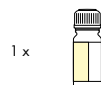

1 x

crea.lign Opaker, 4 g

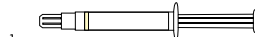

1 x

Capuchón




1 x 10

Cánula de aplicación



1 x 10

crea.lign Gel, 5 g

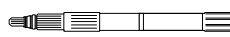


2 x

combo.lign Cánula para mezclas, t. 2



1 x 10

combo.lign Composite de fijación, 8 g

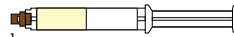

1 x

Surtido en un color elegido por el usuario

➔ Colores clásicos de A a D y color bleach BL3


novo.lign A y P - Tablillas de dientes
Carillas de revestimiento para dientes anteriores y posteriores, con las formas elegidas por el usuario
➔ véase las páginas 32 a 35.

novo.lign P - Tablillas de dientes
Carillas de revestimiento para dientes posteriores, con las formas elegidas por el usuario
➔ Tablas con los tamaños, véase la página 31.

REF VLIGNSET4

visio.lign Kit de iniciación 4

visio.lign Armario/caja para dientes

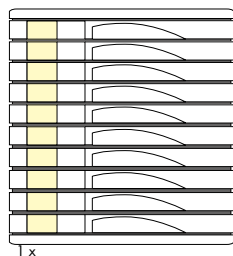

1 x

novo.lign A Carillas de revestimiento - dientes anteriores




26 Tablillas de dientes

novo.lign P Carillas de revestimiento - dientes posteriores



24 tablillas de dientes

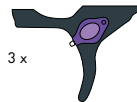crea.lign Unidad mango
jeringa con UVLED

3 x

visio.link, 10 ml



1 x

Surtido en dos colores a elegir→ Colores clásicos de A a D y color
bleach BL3

novo.lign A y P Tablillas de dientes

Carillas de revestimiento para dientes anteriores y posteriores, con las formas elegidas por el usuario,

→ véase las páginas 32 a 35.


novo.lign P Tablillas de dientes

Carillas de revestimiento para dientes posteriores, con las formas elegidas por el usuario

→ Tablas con los tamaños,
véase la página 31.crea.lign Gel Incisal y colores Dentin
elegidos por el usuario,

→ véase la página 16.

crea.lign Opaker, 4 g

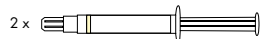


2 x

combo.lign Cánula para mezclas, t. 2



1 x 10

Cánula para mezclas verde, t. 4

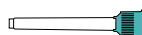

1 x 12

Capuchón



1 x 10

Cánula de aplicación




1 x 10

crea.lign Gel, 5 g




10 x

combo.lign Composite de fijación, 8 g

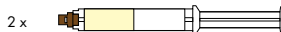

2 x

visio.sil Silicona para llaves, 50 ml

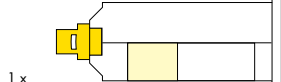

1 x

MKZ-Primer, 5 ml



1 x

Líquido para modelar, 10 ml



1 x


REF VLIGNPRVN1 **novo.lign** Carta de formas vivas A+P

visio.lign Caja de cartón plegable




1 x

novo.lign A Carillas de revestimiento - dientes anteriores

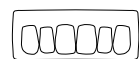

12 x

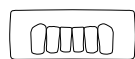


3 x


= 15 tablillas de dientes:

1 tablilla de dientes de cada forma

novo.lign P Carillas de revestimiento - dientes posteriores

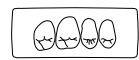

5 x

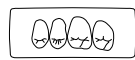

5 x

= 20 tablillas de dientes:


con las formas G y W

en los tamaños:

G3, G4 y W3, W4, W5.



5 x

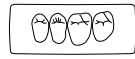

5 x




2 x

= 4 tablillas de dientes:

con la forma L, 1 x los tamaños:

L2 y L3

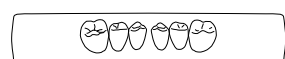

2 x

Surtido en un color elegido por el usuario→ Colores clásicos de A a D y color
bleach BL3REF VLIGNPRVN1 **novo.lign** novo.lign Kit de formas - número reducido de formas

visio.lign Caja de cartón plegable



1 x

novo.lign A Carillas de revestimiento - dientes anteriores



11 x



3 x

= 14 tablillas de dientes:

1 tablilla de dientes de cada forma

(no se incluye la forma K53 de la arcada superior)

novo.lign P Carillas de revestimiento - dientes posteriores



5 x




5 x

= 20 tablillas de dientes:

formas G y W en los tamaños:

G3 y G4,

W3, W4 y W5.

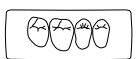

5 x



5 x

Surtido en un color elegido por el usuario→ Colores clásicos de A a D y color
bleach BL3

4

neo.lign

choose natural beauty



LOS DIENTES COMPLETOS
NEO.LIGN TIENEN
IDÉNTICO COLOR, FORMA
Y MATERIAL QUE LAS
CARILLAS DE REVESTIMIENTO
NOVO.LIGN. POR ESO SU
COMBINACIÓN RESULTA
ÓPTIMA PARA CONSEGUIR
UNIFORMIDAD ESTÉTICA. EL
DISEÑO LINGUALIZADO DE LA
SUPERFICIE DE MASTICACIÓN
DE NEO.LIGN RESULTA ÓPTIMO
PARA PRÓTESIS TOTALES. LA
GRAN RESISTENCIA MECÁNICA
DE LOS DIENTES NEO.LIGN
LOS HACE IDÓNEOS PARA
LAS PRÓTESIS DENTALES
IMPLANTOSOPORTADAS.

DIENTES COMPLETOS

neo.lign | Dientes completos



Estructura de mamelón natural con 4 capas cromáticas. La capa de transpa adicional interpuesta le confiere un efecto anacarado con una sensación de profundidad natural.



Ranuras mecanizadas con el propósito de obtener una estructura natural de la superficie.



Superficies funcionales óptimas para guiar la mordida: los dientes de las arcadas inferior y superior encajan de forma natural.

La curvatura óptima del diente proporciona al labio el apoyo necesario para conseguir un aspecto natural y juvenil.

Los dientes completos neo.lign están formados por 5 capas finas de un composite de PMMA (polimetilmetacrilato) resistente a grandes impactos y 4 capas cromáticas. Son adecuados para la confección de restauraciones con prótesis totales y para la técnica combinada. La alta resistencia mecánica de los dientes neo.lign los hace ideales para las prótesis dentales implantosoportadas.

Al igual que las carillas novo.lign, los dientes completos neo.lign se fabrican tomando como modelo arcadas de dientes reales.

Gracias a esto, su aspecto resulta particularmente natural. La estratificación morfológica

proporciona además un efecto de profundidad natural.

Los dientes completos neo.lign tienen el mismo color, forma y material que las carillas novo.lign. La estratificación de neo.lign y la de novo.lign también están perfectamente armonizadas. Esto permite la combinación perfecta de neo.lign con novo.lign.

La superficie homogénea y densa de los dientes completos neo.lign garantiza la solidez de los colores y la resistencia a la placa a largo plazo.

La gama de dientes completos neo.lign incluye dientes anteriores y posteriores.

Los dientes posteriores permiten la creación de cualquier concepto de oclusión gracias a los diseños especiales de las superficies masticatorias de los neo.lign con las formas G y las formas L.



- Con las formas L, el sistema visio.lign ofrece un diseño lingualizado de la superficie masticatoria, especialmente indicado para la confección de restauraciones mediante prótesis totales.
- Las formas neo.lign G disponen de un diseño multifuncional de la superficie masticatoria. Su esbelta forma las hace especialmente indicadas cuando el espacio es reducido.

Todas las formas de dientes neo.lign anteriores y posteriores están disponibles en los colores A-D, así como en un tono descolorido «bleach», el BL3.

4 CAPAS CROMÁTICAS

neo.lign

neo.lign | Codificación

Todas las tablillas de dientes completos neo.lign llevan impresas las inscripciones en color dorado.

neo.lign A




La **A** indica que es anterior, e incluye todas las formas de dientes anteriores para arcada superior e inferior.

Forma del diente, p. ej. **D48**

Color del diente, p. ej. **B4**

neo.lign P

Formas G

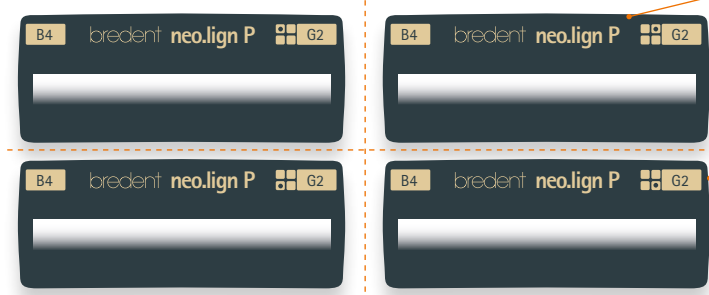


La **P** indica que es posterior, e incluye todas las formas de dientes posteriores para arcada superior e inferior.

En las variantes de las carillas de revestimiento de novo.lign P se diferencia entre las formas **G** y **L**.

Tanto las formas G como las formas L están disponibles en diferentes tamaños. El tamaño se ha identificado mediante números. Las formas G de los dientes completos están disponibles en los tamaños G2, G3 y G4, y las formas L en los tamaños L1, L2, L3 y L4.

➔ Véase las tablas de tamaños en la página 45.

Formas L

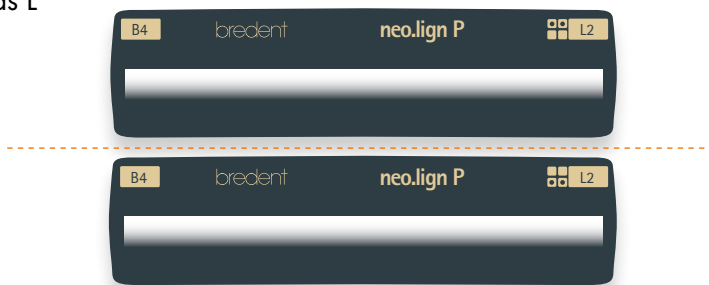

Las formas G están agrupadas por cuadrantes, de modo que en una tablilla de dientes hay premolares y molares, por ejemplo, de la arcada inferior del 4.º cuadrante de una forma y un tamaño concreto, por ejemplo el **G2**.

En la tablilla de dientes de las formas G y L están representados los cuatro cuadrantes mediante cuatro cajitas. El cuadrante correspondiente está señalado con un punto.

Las formas L tienen en la tablilla de dientes o bien todos los dientes de la arcada superior (16, 15, 14, 24, 25, 26), o bien todos los de la arcada inferior (46, 45, 44, 34, 35, 36).

neo.lign | Colores y formas

neo.lign A

Anterior / dientes anteriores



- 13 formas de maxilar superior
- 4 formas de maxilar inferior

Variedad sistematizada



neo.lign P

Posterior / dientes posteriores

Formas G




- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Formas L



- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias para prótesis totales

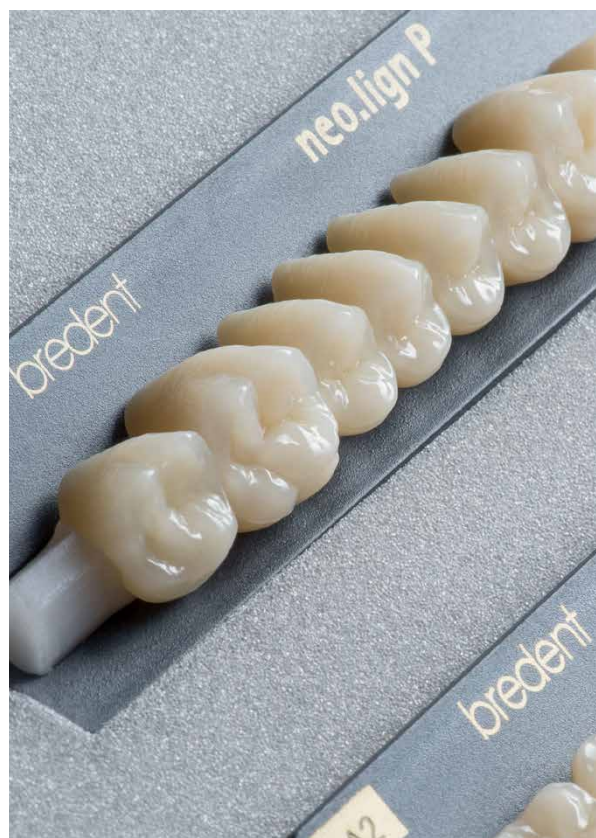

Disponible en los siguientes tamaños

G2 **G3** **G4**

pequeño  grande

Disponible en los siguientes tamaños

L1 **L2** **L3** **L4**

pequeño  grande

Todas las formas neo.lign A y neo.lign P están disponibles en los siguientes colores:



neo.lign | Variedad de formas

Arcada superior anterior



F41

REF TOF41 _ _ _ S



F44

REF TOF44 _ _ _ S



B43

REF TOB43 _ _ _ S



I45

REF TOI45 _ _ _ S



C43

REF TOC43 _ _ _ S



H46

REF TOH46 _ _ _ S



A44

REF TOA44 _ _ _ S



S46

REF TOS46 _ _ _ S

Arcada inferior anterior



T33

REF TUT33 _ _ _ S



T35

REF TUT35 _ _ _ S

El código del color completa la REF:

BL3

B L 3

A1

A 1 0

A2

A 2 0

A3

A 3 0

A3,5

A 3 5

A4

A 4 0

B1

B 1 0

B2

B 2 0



I47

REF TOI47 _ _ _ S



B51

REF TOB51 _ _ _ S



D48

REF TOD48 _ _ _ S



M48

REF TOM48 _ _ _ S



D49

REF TOD49 _ _ _ S



D38

REF TUD38 _ _ _ S



D41

REF TUD41 _ _ _ S



B30



B40



C10



C20



C30



C40



D20



D30



D40

neo.lign | Variedad de formas

Arcada superior/inferior posterior



G2

REF TO1G2 _ _ _



G2

REF TO2G2 _ _ _



G3

REF TO1G3 _ _ _



G2

REF TU4G2 _ _ _




G2

REF TU3G2 _ _ _



G3

REF TU4G3 _ _ _

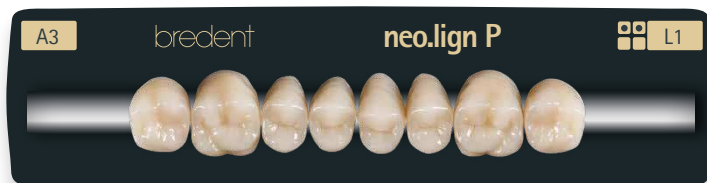

L1

REF TOWL1 _ _ _



L2

REF TOWL2 _ _ _



L1

REF TUWL1 _ _ _



L2

REF TUWL2 _ _ _

El código del color completa la REF:



B L 3



A 1 0



A 2 0



A 3 0



A 3 5



A 4 0



B 1 0



B 2 0



G3

REF TO2G3 _ _ _



G4

REF TO1G4 _ _ _



G4

REF TO2G4 _ _ _



G3

REF TU3G3 _ _ _



G4

REF TU4G4 _ _ _




G4

REF TU3G4 _ _ _




L3

REF TOWL3 _ _ _

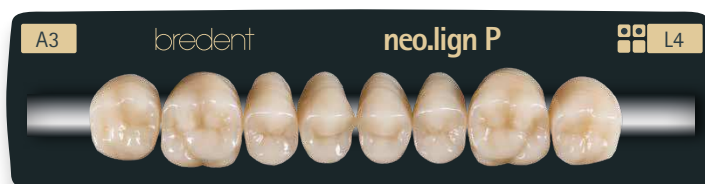


L4

REF TOWL4 _ _ _

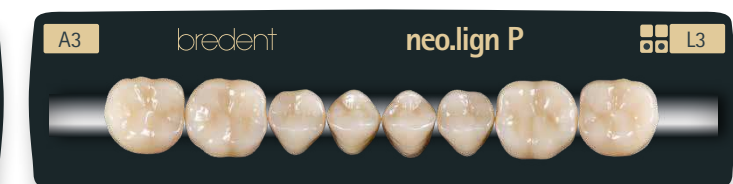

L3

REF TUWL3 _ _ _

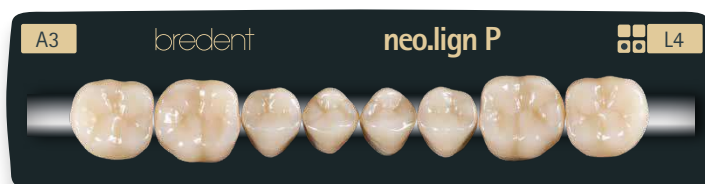

L4

REF TUWL4 _ _ _



B 3 0



B 4 0



C 1 0



C 2 0



C 3 0



C 4 0



D 2 0



D 3 0



D 4 0



neo.lign | Kits

REF VLIGNPRVT


Carta de formas viv neo.lign A y P

visio.lign Caja de cartón plegable




1 x

neo.lign A Dientes completos - dientes anteriores

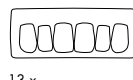

13 x

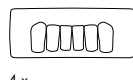

4 x

= 17 Tablillas de dientes:

1 tablilla de dientes de cada forma

neo.lign P Dientes completos - dientes posteriores Formas G



3 x



3 x

= 12 tablillas de dientes:


Con la forma G, 1 x los tamaños:

G2, G3 y G4

neo.lign P Dientes completos - dientes posteriores Formas L



4 x

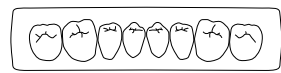

4 x

= 8 tablillas de dientes:

Con la forma L, 1 x los tamaños:

L1, L2, L3 y L4


Surtido de todas las formas de dientes en un color a elegir.

➔ Colores clásicos de A a D y color bleach BL3


REF VLIGNPRVT

neo.lign Kit de formas - reducido número de formas

neo.lign A Dientes completos - dientes anteriores

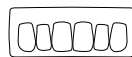

13 x

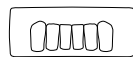

4 x

= 17 tablillas de dientes:

1 tablilla de dientes de cada forma

neo.lign P Dientes completos - dientes posteriores Formas L



4 x



4 x

= 8 tablillas de dientes:

Con la forma L, 1 x los tamaños:

L1, L2, L3 y L4


Surtido en un color elegido por el usuario

➔ Colores clásicos de A a D y color bleach BL3

5

bond.lign

secure natural beauty

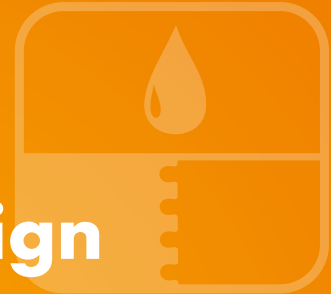

BOND.LIGN ES UN SISTEMA DE UNIÓN ÚNICO PARA LA UNIÓN MEDIANTE ADHESIÓN SEGURA Y DURADERA DE TODOS LOS COMPONENTES Y COMPOSITES DEL SISTEMA VISIO.LIGN CON TODOS LOS MATERIALES DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES COMO METALES NO NOBLES Y NOBLES, TITANIO, HIPC (POLÍMERO/COMPOSITE), PEEK (P. EJ. BIOHPP) Y ÓXIDO DE CIRCONIO.

IMPRIMACIÓN Y ADHESIVO
OPAQUIZANTE
COMPOSITE DE FIJACIÓN

Imprimación y adhesivo



REF **MKZ02004**

5 ml

MKZ-Primer

Unión por adhesión de composite con estructuras de metal

- titanio
- metal no noble
- óxido de circonio
- cerámicas de óxido

La imprimación MKZ-Primer sirve para acondicionar todas las aleaciones de metales con metales no nobles, titanio, óxido de circonio y cerámica de óxido, con el fin de unir estos materiales por medio de una adhesión química con composites, como el crea.lign o novo.lign, y todas las demás resinas, como top.lign y PMMA, entre otras. La imprimación MKZ-Primer puede aplicarse de forma intraoral y resulta óptima para adherir aditamentos personalizados.



REF **MKZEM004**

4 ml

MKZ EM-Aktivator

Unión por adhesión de composite con estructuras de metales nobles

- aleaciones de metales nobles (Au, Ag, Pt, Pd)
- aleaciones eco
(aleaciones con contenido reducido de metal noble)

El activador MKZ EM-Aktivator en combinación con la imprimación MKZ-Primer sirve para acondicionar las estructuras de metales nobles (Au, Ag, Pt, Pd), con el fin de unir estos materiales por medio de una adhesión química con composites, como el crea.lign o novo.lign. MKZ EM-Aktivator es asimismo aplicable intraoralmente, al igual que MKZ-Primer.

⚠ Usar sólo en combinación con la imprimación MKZ!



Aplicación de MKZ EM-Aktivator

1:1 para la mezcla con MKZ-Primer.

REF **APK25003**

4 ml

K-Primer

Unión por adhesión de composite con estructuras de cerámica de óxido

- (di)silicato de litio
- cerámica para revestimientos y cerámica inyectable

La imprimación K-Primer proporciona la unión por adhesión de (di) silicato de litio, cerámica de revestimiento y cerámica inyectable con composites, como p. ej. crea.lign o novo.lign. Resulta ideal para la reparación de revestimientos de cerámica, puesto que K-Primer puede aplicarse intraoralmente.



Silanzado

K-Primer es asimismo adecuado para el silanzado de superficies.

REF **VLPMA10**

10 ml

visio.link

Unión por adhesión de composite con resinas

- resinas de PMMA para prótesis
- Composite
(Composite de trevestimiento/dientes de composite)
- Polímeros de alto rendimiento BioHPP
- PEEK/PEKK/PAEK

visio.link es fotopolimerizable y se aplica para la unión mediante adhesión de resinas PMMA para prótesis, materiales de composite de PMMA de alta resistencia, polímeros de alto rendimiento, como p. ej. BioHPP, y materiales tales como PEEK/PEKK/PAEK con otros composites, como p. ej. crea.lign o novo.lign. visio.link permite asimismo la aplicación intraoral.

bond.lign

Opaquer combo.lign

light



OPL

A1-A3

B1-B2

C1-C2

medium



OPM

A3.5

B3-B4

D2-D3

intensiv



OPI

A4

C3-C4

D4

GUM



OPG

Gingiva



REF CO1X4

4 g

Opaquer combo.lign

es un opaquizante autopolimerizante y fotopolimerizante que garantiza un curado seguro. Su color está armonizado para que pueda usarse con el composite de fijación combo.lign y las carillas de revestimiento novo.lign.

El sistema de unión ha sido comprobado mediante estudios universitarios y es compatible con todas las imprimaciones para metales y los procesos de silanizado, además resulta óptimo cuando se usa retenciones mecánicas.

combo.lign Opaquer está disponible en un color encía y tres colores dentina. De este modo se garantiza la estabilidad del color con todos los colores A-D en combinación con el composite de fijación combo.lign.



Opaquer combo.lign Katalyst

Con el fin de obtener una unión por adhesión óptima es necesario realizar una fotopolimerización. Para la autopolimerización mezclar combo.lign Opaquer Katalyst con la pasta de color combo.lign Opaquer en la proporción 1 : 1.



REF CO1X4KAT

4 g

Opaquer combo.lign Katalyst

Tabla de combinación de colores combo.lign Opaquer

combo.lign Opaquer				
Colores del sistema	light	medium	intensiv	GUM
Colores	A1 - A3 / B1 - B2 / C1 - C2	A3.5 / B3 - B4 / D2 - D3	A4 / C3 - C4 / D4	colores encía

crea.lign Opaker



P 0 1

A1

B2



P 0 2

A2



P 0 3

A3



P 0 4

B1

C1

BL3



P 0 5

C2-C3

D2

D4



P 0 6

B3

B4



P 0 7

A3.5



P 0 8

A4

C4



P 0 9

D3



GUM

Gingiva



crea.lign Opaker

El crea.lign Opaker es fotopolimerizable y garantiza el color en la estratificación libre y al usar las carillas de revestimiento novo.lign. Junto con el Primer MKZ forma la base para la unión óptima con los materiales metálicos y cerámicos de las estructuras y de ese modo construir restauraciones con prótesis de larga vida útil sin fisuras en los bordes. Con tan solo 9 tonalidades de opaquizante se cubre todo el sistema de colores clásicos A-D. El opaquizante especial para encías GUM Opaker es adecuado para todos los tonos de GUM.

REF CLFHO _ _ _

4 g

⚠ En las estructuras de circonio previamente tintadas transluce el color, por lo que no es necesaria la aplicación habitual de un opaquizante, siempre que el color de la estructura se corresponda con el color deseado (A-D).



crea.lign Opaker Z, liner para circonio

El liner fotopolimerizante para circonio es un opáquer transparente. Al trabajar con circonio es imprescindible aplicar, tras la correspondiente imprimación (MKZ Primer), el liner para circonio, para conseguir una unión mediante adhesión garantizada entre el óxido de circonio y el composite.

transparente

REF CLFHOP0Z

4 g

Tabla de combinación de colores crea.lign Opaker

crea.lign Opaker										
Colores del sistema	1	2	3	4	5	6	7	8	9	GUM
Colores	A1 / B2	A2	A3	B1 / C1 / BL3	C2 / C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	D3	colores encía

Para las estructuras de circonio previamente tintadas, como las de circonio, resulta idóneo, entre otros, el opaquizante transparente crea.lign Opaker Z.

combo.lign Composite de fijación

BL3 B L 3	A1 A 1 0	A2 A 2 0	A3 A 3 0	A3.5 A 3 5	A4 A 4 0
	B1 B 1 0	B2 B 2 0	B3 B 3 0		B4 B 4 0
	C1 C 1 0	C2 C 2 0	C3 C 3 0		C4 C 4 0
		D2 D 2 0	D3 D 3 0		D4 D 4 0
				GUM GUM	



REF **CO2X4**
8 g

combo.lign es un composite de fijación fotopolimerizable y de curado dual que proporciona una reproducción segura del color y una unión óptima de las carillas novo.lign y todos los materiales de estructuras.

DTK -Kleber



transparente

REF **54001195**

8 g



opak

REF **54001295**

8 g



El adhesivo de curado dual DTK-Kleber proporciona una unión duradera y segura entre todos los materiales protésicos. Resulta óptimo para aditamentos personalizados unidos por adhesión.

Gracias a ser esterilizable, se evita cualquier contaminación y se garantiza la máxima higiene. El adhesivo DTK-Kleber puede usarse tanto intraoralmente como extraoralmente.



bond.lign
Full Range Bonding Kit



bond.lign
Chipping Repair Kit

bond.lign | Kits

REF CLFHOPSET

crea.lign Opaker Set

crea.lign Opaker, 4 g



- 1 x Color 1
- 1 x Color 6
- 1 x Color 2
- 1 x Color 7
- 1 x Color 3
- 1 x Color 8
- 1 x Color 4
- 1 x Color 9
- 1 x Color 5


crea.lign Opaker

→ véase la página 57

REF COMBOKIT

combo.lign complete kit

combo.lign, 8g

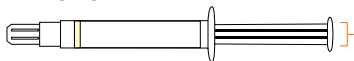

- 1 x BL3
- 1 x B1
- 1 x C3
- 1 x A1
- 1 x B2
- 1 x C4
- 1 x A2
- 1 x B3
- 1 x D2
- 1 x A3
- 1 x B4
- 1 x D3
- 1 x A3.5
- 1 x C1
- 1 x D4
- 1 x A4
- 1 x C2
- 1 x GUM

combo.lign Opaker

→ véase la página 56

REF 54001275

DTK-Kleber opak Kit aditamento

Cánulas para mezcla



1 x 10

Cartucho doble de mezcla
Adhesivo DTK opak, 8 g


1 x

Émbolo de jeringa




1 x

Pincel de un único uso

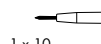

1 x 10

Portapinceles

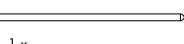

1 x

Tornillo de fijación M1,4



2 x

FGP-Aislante, 3 ml



1 x

MKZ-Primer, 5 ml



1 x

Silano-Pen - Vaso de plástico



1 x 12


REF 54001175

DTK-Kleber Abutment 1 kit

Cánulas para mezcla



1 x 10

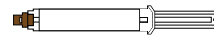Cartucho doble de mezcla
Adhesivo DTK transparente, 8 g


1 x

Émbolo de jeringa




1 x

Pincel de un único uso

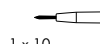

1 x 10

Portapinceles

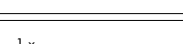

1 x

Tornillo de fijación M1,4



2 x

FGP-Aislante, 3 ml



1 x

MKZ-Primer, 5 ml



1 x

Silano-Pen - Vaso de plástico



1 x 12


REF 54001285

DTK-Kleber opak Kit 5 piezas

Cánulas para mezcla



1 x 10

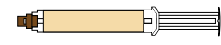Cartucho doble de mezcla
Adhesivo DTK opak, 8 g


1 x

Émbolo de jeringa




1 x

Pincel de un único uso

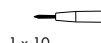

1 x 10

Portapinceles

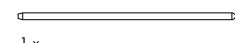

1 x

Adhesivo DTK

→ véase la página 58


REF 54001185

DTK-Kleber transparent Kit 5 piezas

Cánulas para mezcla



1 x 10

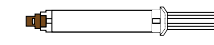Cartucho doble de mezcla
Adhesivo DTK transparente, 8 g


1 x

Émbolo de jeringa




1 x

Pincel de un único uso

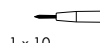

1 x 10

Portapinceles

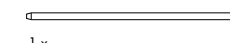

1 x

Adhesivo DTK

→ véase la página 58

REF 54001295

Recambio

cartucho doble de mezcla
Adhesivo DTK opak, 8 g

1 x

REF 54001195

Recambio

cartucho doble de mezcla
Adhesivo DTK transparente, 8 g

1 x


REF 5400bond

Full Range Bonding Kit

bredent medical:

REF 5800bond

Maletín de plástico

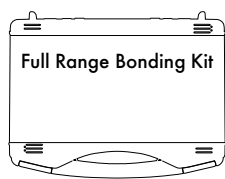

1 x

Bloc para mezclas

pequeño



1 x

Silano-Pen - Vaso de plástico



1 x 12

MKZ-Primer

5 ml



1 x

K-Primer

4 ml



1 x

visio.link

10 ml



1 x

Pincel dental de un único uso




1 x 10

Portapinceles, negro



1 x

Intra-Oral-Tips + Cánulas para mezcla

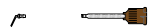

1 x 12

Adhesivo DTK opak, 8 g



1 x

Adhesivo DTK transparente, 8 g



1 x

FGP-Aislante, 3 ml



1 x

Tornillo de fijación M1,4



2 x

REF CLIGNSETA

Chipping Repair Kit

Caja de aluminio



1 x

MKZ-Primer

5 ml



1 x

MKZ EM-Aktivator

4 ml



1 x

K-Primer

4 ml



1 x

1 x A2
1 x A3

crea.lign Paste Dentin, 3 g



Dispensador giratorio



2 x

Silano-Pen - Vaso de plástico

1 x 12



Capuchón

1 x 10



Cánula de aplicación

1 x 10




crea.lign Gel Incisal, 5 g



1 x E2

crea.lign Opaker, 4 g

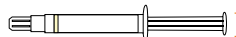1 x Color 2
1 x Color 3

visio.link

10 ml

1 x



crea.lign Gel Dentin 5 g


1 x A2
1 x A3

crea.lign Opaker Z, liner para circonio 4 g




1 x

Instrucciones del procesamiento adjuntas

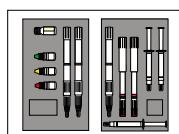

1 x

cara anterior

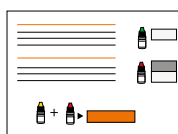

cara posterior

para el odontólogo

6

visio.CAM

design natural beauty



LA EXCELENCIA DE LOS
MATERIALES DEL SISTEMA
VISIO.LIGN TAMBIÉN
ESTÁ DISPONIBLE PARA EL
PROCESAMIENTO CON
CAD/CAM. LOS BLANKS
BRECAM.HIPC DE LA LÍNEA
VISIO.CAM SON COMPATIBLES
CON TODO EL SISTEMA
VISIO.LIGN.

BLANKS DE COMPOSITE

Blanks de composite

		W DCS		AG	ZZ
	breCAM.HIPC	Ø 98,5 mm		Ø 98 mm	Ø 95 mm
	Color	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	bleach	REF 54003418	REF 54003398	REF 54003458	REF 54003438
	A1	REF 54003419	REF 54003399	REF 54003459	REF 54003439
	A2	REF 54003420	REF 54003400	REF 54003460	REF 54003440
	A3	REF 54003421	REF 54003401	REF 54003461	REF 54003441
	A3,5	REF 54003422	REF 54003402	REF 54003462	REF 54003442
	A4	REF 54003423	REF 54003403	REF 54003463	REF 54003443
	B2	REF 54003424	REF 54003404	REF 54003464	REF 54003444
	B3	REF 54003425	REF 54003405	REF 54003465	REF 54003445
	C2	REF 54003426	REF 54003406	REF 54003466	REF 54003446
	C3	REF 54003427	REF 54003407	REF 54003467	REF 54003447
	D2	REF 54003428	REF 54003408	REF 54003468	REF 54003448
	D3	REF 54003429	REF 54003409	REF 54003469	REF 54003449
	transparente	REF 54003430	REF 54003410	REF 54003470	REF 54003450

Las ventajas del sistema visio.lign se han transferido también al procesamiento digital con visio.CAM. HIPC son las iniciales de «high impact polymer composite», siendo este composite fruto del desarrollo del sistema visio.lign. Por sus características químicas, breCAM.HIPC se corresponde con las carillas de revestimiento novo.lign, por lo que este material resulta excelente para sustitutos dentales permanentes. En su fabricación se aplica presión y calor –250 bar a unos 120 °C –, de forma similar al procesamiento de los dientes prefabricados.



Al haber prescindido de vidrio dental y resina fotopolimerizable queda garantizada una gran solidez del color y la resistencia a la placa dental. Los blanks de composite breCAM.HIPC de la línea visio.CAM están óptimamente armonizados con los componentes del sistema visio.lign.

Se suministran con una altura de 20 mm para los equipos DCS, Wieland, Amann Girrbach y Zirkonzahn; y también con una altura de 16 mm para DCS y Wieland. Están disponibles en los colores más habituales A-D.

visio.CAM

7



Tools

support natural beauty

EN EL SIGUIENTE CAPÍTULO
SE PRESENTA UNA SERIE DE
DISPOSITIVOS, INSTRUMENTOS
Y ACCESORIOS
RECOMENDADOS PARA LA
APLICACIÓN ÓPTIMA Y FÁCIL DE
LOS PRODUCTOS VISIO.LIGN.

EQUIPOS,
INSTRUMENTAL
Y ACCESORIOS

bre.Lux LED N2
Lámpara manual
con equipo alimentación
Full Range System

REF 14001010

1 pieza



Especificaciones técnicas bre.Lux LED N2

Lámpara manual

U	5 VAC
P	5 W
Espectro luz	370 - 500 nm

Transformador lámpara manual

U	100 - 240 VAC
P	max. 15 W
Frec	50 - 60 Hz
Salida	5 V / 3 A

bre.Lux PowerUnit 2
Light-Tray con 30 sticks

REF 14001002

1 x 30 sticks

bre.Lux PowerUnit 2
Light-Tray Sticks cilindro

REF 14001003

1 x 30 piezas

bre.Lux PowerUnit 2
Light-Tray Sticks cono

REF 14001004

1 x 28 piezas

Equipo de fotopolimerización con
luz LED bre.Lux PowerUnit 2 Set

Convincente equipo por la seguridad y rapidez con la que polimeriza objetos. La innovadora tecnología LED aprovecha completamente el espectro de luz relevante de 400 nm, proporcionando así una polimerización de gran calidad. Las diferentes longitudes de onda alcanzan diferentes profundidades, con el fin de alcanzar un curado completo con mayor rapidez. Permite la libre programación para cualquier necesidad, incluso en caso de usar materiales novedosos.

Especificaciones técnicas bre.Lux PowerUnit 2

Equipo básico

U	100 - 240 VAC
P	130 W
Frec	50/60 Hz
Fusible	T 2.0 A
Espectro luz	370 - 500 nm

Ventajas

Polimerización completa asegurada

- pues todas las ondas luminosas están disponibles
 - = máxima penetración
 - = resultado de máxima calidad

Velocidad de polimerización imbatible

- 72 lámparas + full range
 - + plato giratorio + Light Tray

Seguridad

- aumento suave y gradual de la potencia de la luz
- control del calor 45 - 55 °C, ajustable hasta 65 °C en programas de ajuste personalizado
- protección contra el sobrecalentamiento
- desconexión automática de la luz con señal acústica al finalizar el programa

bre.Lux PowerUnit 2 Set Equipo y lámpara de mano con accesorios

- bre.Lux PowerUnit 2 Equipo básico
- + bre.Lux LED N2 Lámpara manual
(incluye soporte flexible y adaptador
para conectar a la red)
- + plato giratorio
- + Light-tray (con 30 sticks)

REF 14001015

1 pieza

bre.Lux PowerUnit 2 Equipo con accesorios Full Range System

REF 14001000

1 pieza



- 10 programas de ajuste personalizado +
1 programa de luz continua

Larga vida útil de las lámparas LED

- 20 000 horas de funcionamiento
o 12 años

Confort

- cómodo y rápido acceso a
los programas
- programable para satisfacer
necesidades particulares
- cajón espacioso
- equipo muy silencioso
- equipo compacto



→ Tiempos de polimerización para el equipo bre.
Lux PowerUnit 2, véase las páginas 70/71.

Tiempos de polimerización

bre.Lux PowerUnit 2

Fabricante	Nombre del producto	Tiempos de polimerización con bre.Lux PowerUnit 2 expresados en segundos [s] / potencia de la luz en porcentajes [%]				
		bre.Lux LED N2 (lámpara manual)		bre.Lux PowerUnit2 (equipo básico)		
		Polimerización inicial (fijar/curado inicial)	Polimerización intermedia (curado intermedio de cada capa)	Polimerización inicial (fijar/curado inicial)	Polimerización intermedia (curado intermedio de cada capa)	Polimerización final (curado final del material)
bredent	visio.link	N/A	30 s	N/A	90 s	90 s
	combo.lign Composite de fijación	30 s	N/A	20 s / 50 % (iProg)	180 s	180 s
	crea.lign Gel	15 s	15 s	20 s / 50 % (iProg)	180 s	360 s
	crea.lign Paste	15 s	15 s	20 s / 50 % (iProg)	180 s	360 s
	combo.lign Opaker	N/A	N/A	N/A	180 s	360 s
	crea.lign Opaker	N/A	N/A	N/A	180 s	360 s
	visio.paint	N/A	N/A	N/A	180 s	360 s
	crea.lign Stains	N/A	N/A	N/A	180 s	360 s
	Ropak UV	N/A	N/A	N/A	180 s **	360 s
	Ropak Kompaktopaker UV	N/A	N/A	N/A	180 s **	360 s
	Ropak Kompaktopaker color diente UV	N/A	N/A	N/A	180 s	360 s
	compoForm UV	15 s	N/A	20 s / 50 % (iProg)	90 s	180 s
	Material para cubeta	N/A	N/A	40 s / 50 % (iProg)	90 s	180 s ⁽¹⁾
	Laca para muñones fotopolimerizante	N/A	30 s *	20 s / 50 % (iProg)	90 s	180 s
	SERACOLL UV	N/A	15 s	N/A	20 s / 50 % (iProg)	40 s / 50 % (iProg)
	QU-connector	N/A	30 s	N/A	90 s	90 s
Heraeus	Signum	N/A	N/A	20 s / 50 % (iProg)	180 s	360 s
	Palatray XL	N/A	N/A	40 s / 50 % (iProg)	90 s	360 s
Shofu	Solidex	N/A	N/A	20 s / 50 % (iProg)	180 s	360 s
GC	Gradia	15 s	N/A	20 s / 50 % (iProg)	180 s	360 s
Wegold	S-Lay	N/A	N/A	20 s / 50 % (iProg)	180 s	360 s
VITA	VITA VM LC PRE OPAQUE / VITA VM LC OPAQUE PASTE	N/A	N/A	N/A	N/A	180 s
	VITA VM LC OPAQUE Pulver	N/A	N/A	N/A	360 s	360 s
	VITA VM LC Composite	30 s	N/A	40 s / 50 % (iProg)	180 s	360 s ⁽²⁾
Degudent	Degudent injoy	N/A	N/A	20 s / 50 % (iProg)	180 s	360 s

Nota:

- * En caso de aplicación única.
- ** Aplicar opaquizante sólo en dos capas.
- (1) Si se usa material para cubeta UV, 180 s en cada cara, superior e inferior.
- (2) En caso de haber piezas intermedias, 2 mm de grosor máximo por estrato.
- (iProg) Requiere programación personalizada: véase los parámetros nuevos, también para la adhesión de piezas prefabricadas de cera. Crear un programa personalizado con un 50 % de potencia luminosa sin etapas (reducción del calor!).
- N/A N/A No aplicable

Los tiempos indicados para la polimerización son indicativos y aplicables a equipos intactos.

Programas personalizados: Las estructuras metálicas almacenan la energía del calor de la luz en mayor grado que los polímeros puros. El calor puede producir efectos positivos en los materiales, como un templado adicional, o conducir a una fragilización o a tensiones en caso de aplicarse de forma excesiva. La acumulación de calor puede controlarse cómodamente ajustando los programas guardados en la memoria mediante automatismos a las condiciones particulares que requiere el material. En caso de trabajos que no llevan metales, o construcciones con grosores de metal de >2 mm, se recomienda la opción de potencia hasta el 100 % «Red. Leistung aus (reducción de la potencia apagada)». Para los trabajos que contienen componentes metálicos o en los que se producen grandes contracciones del material, se recomienda reducir la potencia de la luz con la opción «Red. Leistung an (reducción de la potencia encendida)». No obstante, siempre es posible aumentar la potencia hasta el 100 % en los programas personalizados sin tener que realizar ajustes en el equipo. En caso dado puede modificarse los tiempos de polimerización de forma proporcional.

La lámpara manual puede usarse como alternativa al equipo bre.Lux PowerUnit 2 en la polimerización inicial y la intermedia, la polimerización final deberá realizarse siempre en el equipo bre.Lux PowerUnit 2.

Otros equipos de fotopolimerización adecuados

Tiempos de fotopolimerización para los componentes del sistema visio.lign: visio.link, combo.lign y crea.lign

Fabricante	Nombre del producto	Longitud de onda [nm] *	Tiempos de polimerización con bre.Lux PowerUnit 2 en segundos [s]		
			visio.link	combo.lign	crea.lign / crea.lign - Opaker / combo.lign - Opaker
bredent	bre.Lux PowerUnit 2	370 - 500 nm	90 s	180 s	360 s
Dentsply	Triad 2000	400 - 500 nm	180 s	360 s	600 s
Degudent	Eclipse	k.A.	60 s	180 s	360 s
Heraeus Kulzer	Dentacolor XS, Uni XS, Heraflash	320 - 520 nm	90 s	180 s	360 s
GC	Labolight LV-III	380 - 490 nm	120 s	300 s	600 s
Ivoclar Vivadent	Targes Power Ofen, Luminat 100	400 - 580 nm	240 s	180 s	480 s
Schütz Dental	Spektra 200	310 - 500 nm	120 s	180 s	360 s
Shofu Dental	Solidilite	400 - 500 nm	90 s	180 s	360 s
Kuraray Dental	CS 110	k.A.	120 s	300 s	480 s
Hager & Werken	Speed Labolight	320 - 550 nm	90 s	180 s	480 s
3M ESPE	Visio Beta neu: P1 - P4 alt: U0 - U3	400 - 500 nm	> 240 s (P2)	420 s (P2)	900 s (P1)
			420 s (U1, U3)	900 s (U0)	900 s (U0)

Nota: * Datos del fabricante
k.A. Sin datos

Grosor de las capas/Tablas de correspondencia de colores

Tiempos de polimerización específicos según el grosor de la capa

Material	Grosor máximo de la capa [mm]	Tiempos de polimerización con bre.Lux PowerUnit 2 en segundos [s]	
		Polimerización intermedia (curado intermedio de cada capa)	Polimerización final (curado final del material)
crea.lign Enamel	1 mm	180 s	360 s
crea.lign Incisal	1 mm	180 s	360 s
crea.lign Transpa clear	1 mm	180 s	360 s
crea.lign Dentin	1 mm	180 s	360 s
crea.lign Modifier	1 mm	180 s	360 s
crea.lign GUM	1 mm	180 s	360 s
crea.lign Stains	0,3 mm	180 s	360 s
visio.paint	0,1 mm	180 s	360 s
Con un 30 % de visio.paint mezclado en el crea.lign	0,3 mm	180 s	360 s
crea.lign Paste	2 mm	180 s	360 s
combo.lign	2 mm	180 s	180 s
crea.lign Opaker	0,1 mm	180 s	360 s
combo.lign Opaker	0,1 mm	180 s	180 s


Tools

visio.lign Toolkit

Al mecanizar los materiales del sistema visio.lign con el conjunto de herramientas visio.lign Toolkit se obtiene superficies resistentes a la placa y de colores sólidos con el mismo nivel de calidad y durabilidad que las superficies cerámicas.

Superficies de composite como la cerámica

El conjunto de herramientas visio.lign Toolkit se ha optimizado para realizar los repasados y acabados en composites, como p. ej. en trabajos con el sistema de visio.lign , y contiene fresas, cepillos y pastas para pulido para un acabado perfecto.

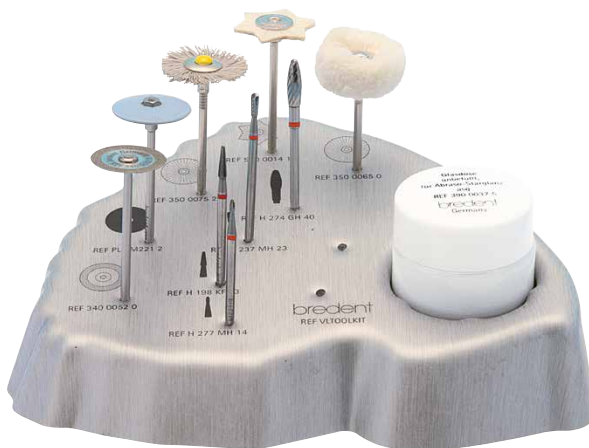

REF VLT00KIT
1 kit, 14 piezas

Soporte de fresas y
envase de cristal, vacío



REF VL1SHELL
1 unidad, 2 piezas

Ventajas

del Surtido de herramientas visio.lign Toolkit

- Fresas con talón biselado consiguen superficies lisas que requieren menos esfuerzo para pulirlas.
- El Surtido contiene pasta para el pulido previo y el pulido de brillo intenso.
- Las herramientas están dispuestas en diferentes niveles para que resulten más fáciles de extraer.
- Bote de vidrio extraíble para evitar que se seque la pasta de pulido brillante.
- Pictogramas y números de referencia para el pedido impresos para una mejor organización.
- Quedan tres espacios libres para instrumental adicional.

crea.lign surface cleaner

Para eliminar de la
superficie la capa de
producto de dispersión



REF 43000600
125 ml

Abraso-Starglanz Pasta para brillo intenso



REF 52000163
2 x 50 ml

Acrypol Pasta para pulir resinas de revestimiento



REF 52000170
170 g

crea.lign Gel

crea.lign acero inoxidable Portajeringas



Portajeringas de acero inox. con guía de resina, sin accesorios, espacio para hasta 6 jeringas crea.lign.

REF 32000960

1 unidad

Portajeringas para crea.lign 5 g + Stains



En el portajeringas crea.lign puede disponerse hasta 12 jeringas crea.lign incluidos los mangos de sujeción.

REF 32000443

1 unidad

Cánula de aplicación + Capuchón



Capuchón de protección opaca, adaptable a todas las cánulas de aplicación.

REF 32000940

10 unidades de cada

Cánula de aplicación opaca adaptable a todas las jeringas crea.lign 5g.

crea.lign Unidad mango jeringa



negro con lámpara UV LED

El mango de sujeción para todas las jeringas de 5 g de gel crea.lign permite una aplicación sencilla y precisa.

REF 32000445

1 unidad

Bloc para mezclas 100 x100 mm



REF 32000460

1 unidad, 100 hojas

Bloc para mezclas 35 x 50 x10 mm



REF 33001144

10 unidades, 100 hojas cada bloc



Mango de sujeción + Cánula de aplicación para jeringas de crea.lign Gel



La unidad mango jeringa se ha concebido especialmente para la jeringa con la que se aplica el gel crea.lign y facilita al usuario -junto con la cánula de aplicación- la dosificación exacta con una mano. Gracias al mango, la jeringa permanece limpia en la palma de la mano y el gel líquido puede dosificarse girando el elemento girador estriado con el dedo pulgar o índice de la misma mano. La otra mano queda libre para otras tareas, p. ej. para sujetar el objeto que se está procesando.



La lámpara manual UV LED está integrada en el mango y puede desmontarse si se requiere. Permite un polimerizado previo breve inmediatamente después de aplicar el gel crea.lign.

Tools

crea.lign Paste

Portajeringas para crea.lign Paste



Soporte transparente para jeringas de resina con espacio para cinco pastas crea.lign, vacío.

REF 32000447

1 unidad

crea.lign Composite Shaper Kit



Instrumental de silicona para el modelado, especialmente desarrollado para la pasta crea.lign. Se usa para la aplicación del material y su modelado.

REF 32000480

1 unidad

Dispensador giratorio crea.lign Paste



Dispensador giratorio para todas las pastas crea.lign con el fin de conseguir una aplicación sencilla y precisa.

REF 32000444

1 unidad

novo.lign

Thermo-Pen



El Thermo-Pen es un soplador de aire caliente con tecnología piezoeléctrica sin llama abierta. Permite calentar las carillas sin correr el riesgo de que se quemen. La temperatura necesaria para deformar las carillas se encuentra en torno a los 250 °C. Al expandirlas resulta más fácil cubrir, por ejemplo, coronas telescópicas.

REF 11001470

1 unidad



Recomendamos el Thermo-Pen para la deformación termoplástica

1




Calentar la carilla

2



Doblar para abrir la carilla caliente

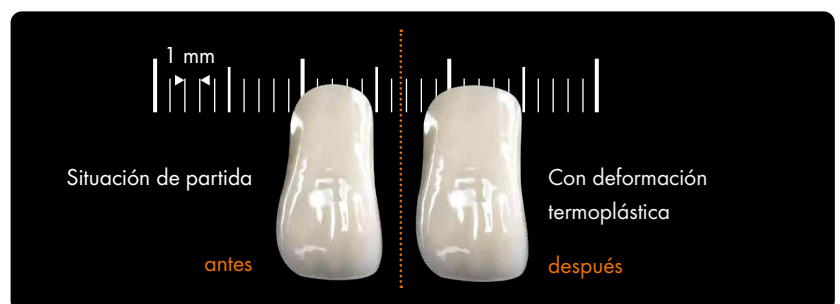

bond.lign

bond.lign
Trípode de acero inoxidable
(sin herramientas)



Soporte de metal de gran calidad con bandejas desmontables, utilizable a ambos lados (orificio grande y pequeño). Soporte de pinceles y amplio espacio de apoyo.

REF 32000970

1 unidad

Dispensador para 5 ml 1:1
combo.lign Composite de fijación



Dispensador para todos los cartuchos de combo.lign con el fin de aplicar el composite de fijación combo.lign de forma sencilla y precisa.

REF 32000441

1 unidad

combo.lign
Cánulas para mezcla
tamaño 2



Cánula para mezclas opaca para todos los composites de fijación combo.lign

REF COMKG210

1 x 10 unidades

Preparación del trabajo

Pistola de dosificación Multisil
Dispensador de siliconas visio.sil



Dispensador para todos los cartuchos de visio.sil, visio.sil ILT y visio.sil fix con el fin de aplicar la silicona de forma sencilla y precisa.

REF 32000440

1 unidad

Cánula de mezcla t. 2 amarilla
para silicona visio.sil fix



Cánula de mezcla para silicona de llaves aplicada con trazo fino

REF 32000451

1 x 12 unidades

Cánula de mezcla t. 4 verde
para siliconas visio.sil y visio.sil ILT



Cánula de mezcla para siliconas transparentes visio.sil

REF 32000457

1 x 12 unidades

visio.lign Armario/caja para dientes

incluye 10 bandejas para cajones, vacías



REF **VLIGNBOX3**

1 pieza

Armario para dientes y carillas para guardar conjuntos de dientes anteriores y posteriores neo.lign / novo.lign.

REF **VLIGNBOX2**

1 unidad

Bandejas para cajones para



26 x conjuntos neo.lign / novo.lign P de dientes posteriores (tablilla de dientes 8 y 6) + 13 x conjuntos neo.lign / novo.lign A / P

REF **00745961**

1 unidad



52 x conjuntos neo.lign / novo.lign A de dientes anteriores / 52 x conjuntos neo.lign / novo.lign P de dientes posteriores (tablilla de dientes 4.)

REF **00745962**

1 unidad



9 x jeringa de crea.lign Opaker y/o jeringa de crea.lign Paste

REF **00745824**

1 unidad



6 x jeringa de combo.lign Opaquer

REF **00745827**

1 unidad



10 x jeringa de crea.lign Gel
3 x mango de sujeción

REF **00745847**

1 unidad



8 x jeringa de crea.lign Gel
y/o jeringa de crea.lign Paste
2 x botellita líquido de unión por adhesión
1 x cartucho de silicona

REF **00745816**

1 unidad

Matriz para transformación del material

Material	Procesamiento			
	Recubrimiento con carillas	Estratificación libre	Estratificación libre con Gnathoflex	Estratificación libre en llave
visio.sil fix	•			
visio.sil	•			
visio.sil IIT	•			•
MKZ-Primer	•	•	•	•
MKZ EM-Aktivator	•	•	•	•
K-Primer	•	•	•	•
visio.link	•	•	•	•
bre.Lux PowerUnit	•	•	•	•
Gnathoflex			•	
crea.lign Modelling Liquid	•	•	•	•
combo.lign Opaker	•			
crea.lign Opaker	•	•	•	•
combo.lign Material de fijación	•			
novo.lign Carillas de revestimiento	•			
crea.lign Gel	•	•	•	•
crea.lign Paste	•	•	•	•
visio.paint Colores para pintar	•	•	•	•
visio.lign Toolkit	•	•	•	•

Publicaciones



Preparación del trabajo

REF 0004820E

crea.lign
Folleto
Técnica de la estratificación inversa
(Vincenzo Musella)



visio.lign

REF 0005690E

visio.lign Image



crea.lign

REF 0005770E

crea.lign
Folleto

REF 0006510E

Kit de estética roja y blanca
Folleto

REF 0099070E

crea.lign Paste
Folleto

REF 0098330E

crea.lign freestyle Manual
Folleto

REF 0094850E

crea.lign
Esquema de estratificación
para la personalización del
rojo y blanco

REF 992990GB

Libro en inglés sobre estética
dental
de Vincenzo Musella



novo.lign

REF 0099390E

novo.lign
Folleto

REF 0002020E

novo.lign Carillas
Folleto para elección del
diseño

REF 0007540E

SKY top.lign Guía rápida
(y novo.lign)
Folleto



neo.lign

REF 0003050E

neo.lign
Folleto

REF 0003290E

neo.lign
Carta de formas

REF 000468GB

neo.lign Dientes completos
Guía de instalación
inglés

REF 00910060E

neo.lign
Folleto de argumentación

bond.lign

REF 0095390E

visio.lign Primer
Folleto visión general

REF 0098930E

bond.lign/DTK-Kleber
Folleto

REF 0004770E

MKZ-Primer/K-Primer
Hoja de datos técnicos

REF 0098940E

Full Range Bonding Kit
Protocolo para la unión por
adhesión

visio.CAM

REF 0005000E

breCAM consumables
Folleto de los materiales
fungibles
CAD/CAM

visio.lign Tools

REF 0002340E

visio.lign
Folleto de instrucciones de
procesamiento

REF 0002740E

visio.lign
Carpeta vacía

REF 0005900E

bre.Lux Power Unit 2
Folleto

Índice

A

Abraso-Starglanz - Pasta para pulir con brillo intenso	72
Accesorios	
Bloc para mezclas	73
bond.lign Trípode de acero inoxidable	75
Cánulas de aplicación + capuchón	73
Cánulas para mezcla para visio.sil fix Silicona	75
Cánulas para mezcla para visio.sil y visio.sil ILT Silicona	75
combo.lign Cánulas para mezcla	75
crea.lign Composite Shaper Kit	74
crea.lign Soporte para jeringas de acero inoxidable	73
crea.lign Soporte para jeringas para crea.lign 5 g y Stains	73
Dispensador combo.lign Composite de fijación	75
Dispensador giratorio crea.lign Paste	74
Dispensador visio.sil Siliconas Multisil Dispositivo dispensador	75
Soporte para herramientas y bote de vidrio, vacíos	72
Soporte para jeringas para crea.lign Paste	74
Thermo-Pen	74
Acrypol - Pasta para el pulido de resinas de revestimiento	72
Adhesivo DTK-Kleber	58

B

Blanks de composite visio.CAM breCAM.HIPC	64
Bloc para mezclas	73
combo.lign Cánulas para mezcla	75
Bonder visio.link	55
bre.Lux	
LED N2 Lámpara manual	68
PowerUnit 2 Equipo básico	69
PowerUnit 2 Light-Tray incluye 30 Sticks	68
PowerUnit 2 Light-Tray Sticks cono	68
PowerUnit 2 Light-Tray Sticks cilindro	68
PowerUnit 2 Set	69
breCAM.HIPC Blanks de composite visio.CAM	64

C

Cánulas de aplicación + capuchón	73
Cánulas para mezcla	
combo.lign - Cánulas para mezcla	75
Cánulas para mezcla de silicona visio.sil fix	75
Cánulas para mezcla de siliconas visio.sil y visio.sil ILT	75
Carillas de revestimiento	
Carillas de revestimiento novo.lign	32-35
Thermo-Pen	74
Cepillos del kit para repasado para revestimientos de composite visio.lign Toolkit	25, 72
Chipping Repair Kit	61
combo.lign - Composite de fijación	58
Cánulas para mezcla	75
Dispensador combo.lign Composite de fijación	75
Kit completo	60
Opaquizante	56
Opaquer Katalyst	56
Composite de revestimiento	
Bloc para mezclas	73
Cánulas de aplicación + capuchón	73
crea.lign	
Composite Shaper Kit	74
Soporte para jeringas de acero inoxidable	73
freestyle - Kit iniciación	23
Gel Dentin	16
Gel GUM	16
Gel Incisal	16
Gel Modifier	16
Gel Transpa Clear	16
Gel	12, 16

Líquido para modelar	18
Opaker	57
Opaker Set.....	60
Opaker Z, Zirkonliner	57
Paste complete Kit.....	23
Paste Dentin.....	17
Paste GUM.....	17
Paste Incisal.....	17
Paste Kit de iniciación con 10 masillas	22
Paste Kit de iniciación con 9 masillas a elegir.....	22
Paste Transpa Opal	17
Paste.....	12, 17
Kit con portajeringas	22
Soporte para jeringas de acero inoxidable.....	73
Soporte para jeringas para crea.lign 5 g & Stains	73
Stains	16
Kit de iniciación N	24
Limpiador de superficies.....	72
Kit de ensayo, colores A2, A3, A3,5	25
Sistema de revestimiento Pasta + Gel Kit completo.....	21

D

Dientes completos neo.lign.....	46-49
Dispensador	
combo.lign Composite de fijación	75
visio.sil Siliconas Multisil Dispositivo dispensador	75
Dispensador giratorio crea.lign Paste	74
DTK-Kleber	58
Abutment - surtido	60
opak Abutment - kit	60
opak - kit	60
transparent - kit.....	60

E

Estética del rojo y blanco - kit.....	24
---------------------------------------	----

F

Fotopolimerización equipo	
bre.Lux LED N2 Lámpara manual.....	68
bre.Lux PowerUnit 2 Equipo básico	69
bre.Lux PowerUnit 2 Light-Tray incluye 30 sticks.....	68
bre.Lux PowerUnit 2 Light-Tray Sticks cono	68
bre.Lux PowerUnit 2 Light-Tray Sticks cilindro	68
bre.Lux PowerUnit 2 Set	69
Fresas - Kit para el repasado de revestimientos de composite visio.lign Toolkit	25, 72
Full Range Bonding Kit.....	61

I

Imprimación	
bond.lign - Trípode de acero inoxidable.....	75
K-Primer.....	55
MKZ EM-Aktivator	54
MKZ-Primer.....	54

K

K-Primer	55
Kit carillas de revestimiento	
Carta de formas de aspecto vivo novo.lign A & P	39
novo.lign Formen Kit - número reducido de formas	39
visio.lign Kit de iniciación 4.....	38
visio.lign Sistema de revestimiento novo.lign A + P Kit de iniciación 2	37
visio.lign Sistema de revestimiento Kit de iniciación 3.....	37

Kit composite de revestimiento	
crea.lign freestyle - Kit de iniciación	23
crea.lign Paste complete Kit	23
crea.lign Paste Kit de iniciación con 10 masillas	22
crea.lign Paste Kit de iniciación con 9 masillas a elegir	22
crea.lign Kit con soporte para jeringas	22
crea.lign Kit de iniciación N.....	24
crea.lign Kit de ensayo colores A2, A3, A3,5.....	25
crea.lign Sistema de revestimiento pasta + gel - kit completo	21
Kit para la estética del rojo y blanco	24
visio.lign Toolkit Kit para el repasado de revestimientos de composite	25, 72
visio.paint Pinturas de colores Surtido	18, 24
Kit dientes completos	
Carta de formas de aspecto vivo neo.lign A & P	51
neo.lign Kit con número reducido de formas.....	51
Kit equipo de fotopolimerización bre.Lux PowerUnit 2	69
Kit para el repasado de revestimientos de composite visio.lign Toolkit.....	25, 72
Kit para unión por adhesión	
Chipping Repair Kit.....	61
combo.lign complete kit	60
crea.lign Opaker Set	60
DTK-Kleber Abutment - kit.....	60
DTK-Kleber opak Abutment Set.....	60
DTK-Kleber opak - kit	60
DTK-Kleber kit transparent.....	60
Full Range Bonding kit.....	61
Recambio de cartucho doble para mezcla DTK-Kleber opak	60
Recambio de cartucho doble para mezcla DTK-Kleber transparent.....	60
L	
Lámpara manual bre.Lux LED N2.....	68
Limpieza de crea.lign - Producto de limpieza para superficies	72
Liquid crea.lign - Líquido para modelar	18
M	
MKZ EM-Aktivator	54
MKZ-Primer	54
N	
neo.lign - Dientes completos.....	46-49
Carta de formas de aspecto vivo A & P	51
Kit de un número reducido de formas.....	51
novo.lign Carillas de revestimiento.....	32-35
Carta de formas de aspecto vivo novo.lign A & P	39
Kit de un número reducido de formas.....	39
O	
Opaquizantes	
crea.lign Opaker	57
crea.lign Opaker Z, Zirkonliner	57
Opaquer combo.lign	56
Opaquer combo.lign Katalyst.....	56
P	
Pastas para pulir	
Abraso-Starglanz - Pasta para pulir con brillo intenso	72
Acrypol - Pasta para el pulido de resinas de revestimiento	72
Pinturas para maquillar visio.paint - Surtido	18, 24
Pulidores del kit para repasado para revestimientos de composite visio.lign Toolkit	25, 72
R	
Recambios del cartucho doble para mezcla	
DTK-Kleber opak	60
DTK-Kleber transparent.....	60

S

Silicona

Dispensador visio.sil Siliconas Multisil.....	75
Cánulas para mezcla para visio.sil fix Silicona	75
Cánulas para mezcla para siliconas visio.sil y visio.sil ILT	75
visio.sil fix	8
visio.sil ILT	9
visio.sil.....	9
Soporte para herramientas y bote de vidrio, vacíos	72
Soporte para jeringas para crea.lign Paste	74
Surtido para pinturas de maquillaje visio.paint.....	18, 24

T

Thermo-Pen	74
------------------	----

V

visio.CAM- Blanks de composite breCAM.HIPC	64
visio.lign	
Carta de formas de aspecto vivo novo.lign A & P	39
Kit de herramientas para el repasado de revestimientos de composite.....	25, 72
Kit de iniciación 4	38
Sistema de carillas novo.lign A + P Kit de iniciación 2	37
Sistema de carillas Kit de iniciación 3	37
visio.link.....	55
visio.paint Surtido de colores de maquillaje	18, 24
visio.sil	9
visio.sil fix	8
visio.sil ILT.....	9

visio.lign

Sistema estético y funcional

por capas



crea.lign

revestir



novo.lign

montaje



neo.lign

fresar



visio.CAM

maquillar



visio.paint

unión



bond.lign

bredent
group

0095040E-20210413
Salvo error y modificaciones

