



create natural beauty
Rot-Weiß-Ästhetik

crea.lign
Verblendkomposit

Schichtschema zur ROT-WEISS Individualisierung

Schichtanleitung crea.lign GUM

1



Mit beige wird der Knochen dargestellt.

2



Mit lila wird die Tiefenwirkung erzielt. Lila wird von der Umschlagfalte zu den Zähnen hin ausgestrichen.

3



Mit rosa werden die vorigen Schichten abgedeckt.

4




Mit pink werden die Alveolen betont.

5



Mit red werden die gut durchbluteten Bereiche betont.

6

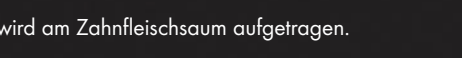

Light wird am Zahnfleischsaum aufgetragen.

6



Mit transpa wird die ganze Oberfläche versiegelt.

powered by
visio.lign

bredent
group



create natural beauty
Rot-Weiß-Ästhetik

crea.lign

Verblendkomposit

Schichtschema zur ROT-WEISS Individualisierung

Schichtanleitung crea.lign Paste GUM

1



Mit Paste PO den Randbereich gestalten.

2



Mit Paste PL die Alveolen aufbauen.

3



Mit light den Zahnfleischsaum auftragen.

4



Mit lila wird die Tiefenwirkung erzielt.

Mit red werden die gut durchbluteten Bereiche betont.

5



Mit transpa wird die ganze Oberfläche versiegelt.



0094850D-20160411
Irrtum und Änderungen vorbehalten

bredent

bredent
gum