



create natural beauty

Estetica bianca e rosa

crea.lign

Composito per il rivestimento estetico

Schema per la caratterizzazione dell'estetica bianca e rosa

Istruzioni per la stratificazione con crea.lign GUM

1



Con la massa beige viene riprodotto il tessuto osseo.

2



Con la massa lilla si ottiene un effetto di profondità. La massa lilla viene applicata sulla zona delle pieghe trasverse fino ai denti.

3



Con la massa rosa vengono coperti gli strati precedenti.

4



Con la massa pink vengono messi in risalto gli alveoli.

5



Con la massa rossa vengono messe in risalto le zone ben irrorate di sangue.

La massa light viene applicata sul bordo gengivale.

6



Con la massa transpa viene sigillata l'intera superficie.

powered by
visio.lign

bredent
group



create natural beauty

Estetica bianca e rosa

crea.lign

Composito per il rivestimento estetico

Schema per la caratterizzazione dell'estetica bianca e rosa

Istruzioni per la stratificazione con crea.lign GUM in pasta

1



Con la massa in pasta PO viene realizzata la zona del margine.

2



Con la massa in pasta PL vengono creati gli alveoli.

3



Applicare la massa light sul bordo gengivale.

4



Con la massa lilla si ottiene un effetto di profondità.



Con la massa rossa vengono messe in risalto le zone ben irrorate di sangue.

5



Con la massa transpa viene sigillata l'intera superficie.



00948501-20160411
Salvo modifiche ed errori

bredent

bredent